

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-02-05

Innehållsansvar: Malgorzata Jilderby, (marji6), Sektionsledare

Giltig till: 2027-02-05

Godkänd av: Christina Johansson, (chrer10), Vårdenhetschef

Överföra bilder/undersökningar manuellt från Adora till PACS

Syfte

Manuell rutin då bilder/undersökningar inte gått över från modalitet till PACS.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Åtgärder

Manuell rutin

- Klicka på ***past*** i övre vänstra hörnet på skärmen.
- Välj aktuell undersökning och klicka ***recall exam***.
- I övre listan kan man välja om man vill se alla bilder som är tagna genom att klicka på ikonerna med ***fyra fyrkanter***.
- Markera de önskade bilder som ska överföras.
- Klicka på ***skiftnyckeln*** i övre högra hörnet.
- Klicka på ***send exam*** för att skicka över hela undersökningen eller ***send image*** om bara en eller flera bilder ska över.
- Klicka ***back to list*** för att komma ur undersökningen när du är färdig.

Innehållsansvariga

Sanna Axelsson, röntgensjuksköterska och
Malgorzata Jilderby, röntgensjuksköterska

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Malgorzata Jilderby, (marji6), Sektionsledare

Godkänd av: Christina Johansson, (chrer10), Vårdenhetschef

Dokument-ID: NU10095-1819752655-503

Version: 4.0

Giltig från: 2025-02-05

Giltig till: 2027-02-05