

Gäller för: Ortopedi

Giltig från: 2025-03-04

Innehållsansvar: Marita Andersson, (maran3), Sjuksköterska

Giltig till: 2027-03-04

Granskad av: Nina Bååw Wennerstrand, (ninwe2), Vårdenhetschef

Godkänd av: Hans Svensson, (hansv16), Verksamhetschef

Sug och syrgas i behandlingsrum – kontroll avdelning 4

Revidering i denna version

Ingen revidering i denna version. Giltighetstiden förlängd.

Bakgrund

I behandlingsrummet finns sug/syrgastub på akutvagnen (det finns en särskild rutin för kontroll av akutvagnens innehåll på avdelning 4 hemsida i SOFIA/SharePoint), den transportabla sug/syrgastuben, en sug/syrgastub på väggen, minst två tuber i ställ på golvet. När behov av att använda sug och/eller syrgas uppstår är det viktigt att allt fungerar enligt rutin.

Syfte

Att säkerställa att byte av sug/syrgastuber samt kontroll av tillbehör för sug/syrgasbehandling sker enligt rutin.

Vilka berörs

Omvårdnadspersonal, avdelning 4

Åtgärder

Kontroll av sug/syrgas i behandlingsrum sker natten mellan torsdag och fredag samtidigt som kontroll av akutvagnen. Åtgärden signeras via enhetens webbsida/kontrollfunktion.

Byte av tuberna sker när de är tomma. Tänk på att säkerställa att tuberna räcker om patient ska till exempelvis röntgen. Om mindre volym överväg att ta med två tuber. Meddela Västfastigheter (Weblord) för hämtning av tomma tuber och påfyllning av nya. Minst en tub ska vara öppen.

Den övre gröna delen med behållare på sugen är av engångstyp och slängs efter användning.

Syrgas

Kontrollera:

- Att syrgasmask och grimma finns i korg.
- Att pocketmask finns och är klar för användning i korg med förlängningsslang. Slangen ska vara cirka två meter lång.
- Att syrgas kommer. Att flödesmätaren rör sig och att nippeln sitter fastskruvad.
- Att den transportabla syrgastuben fungerar som ovan och att det finns tillbehör.
- Att det finns upp till två tuber på väggen för sängtransport, byte på akutvagn och den transportabla tuben.

Sug

Kontrollera:

- Att sugen fungerar genom att starta den. Kontrollera att manometern går upp till minst -60kPa när Y-röret hålls för.
- Att sugslangen är cirka två meter lång.
- Att det finns två sugkatetrar i korgen varav en är kopplad (nr 14).
- Att utgångsdatum inte har gått ut.
- Att den uppkopplade transportabla sug och syrgastuben fungerar som ovan och att det finns sugkatetrar.

Evidens/källa: Västfastigheter, HLR-enheten

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ortopedi

Innehållsansvar: Marita Andersson, (maran3), Sjuksköterska

Granskad av: Nina Bååw Wennerstrand, (ninwe2),
Vårdenhetschef

Godkänd av: Hans Svensson, (hansv16), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10097-1869289359-190

Version: 2.0

Giltig från: 2025-03-04

Giltig till: 2027-03-04