

Gäller för: Ortopedi

Innehållsansvar: Niklas Engström, (niken3), Sjuksköterska

Granskad av: Eva Olsson, (evaol42), Vårdenhetschef

Godkänd av: Hans Svensson, (hansv16), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-02-03

Giltig till: 2028-02-03

Kontroll av sugutrustning i behandlingsrum på avd 52-55

Förändringar sedan föregående version

Borttagen del om att utförd kontroll signeras via enhetens websida/kontrollfunktion.

Bakgrund och syfte

Utänför behandlingsrummen på avdelning 52-55 finns sug kopplad till syrgastub på akutvagnen samt vid luftuttaget på väggen i behandlingsrummen.

Kontroll av sug sker varje natt (med undantag av sugen på syrgastub på akutvagnen som kontrolleras enligt särskild rutin – se kvalitetsrutiner på Intranätet) för att säkerställa funktion av sugutrustning i behandlingsrummen på avdelning 52-55.

Avgränsningar

Gäller vårdpersonal på avdelning 52-55, Ortopedkliniken, NU-sjukvården

Utförande

Åtgärder Internkontroll

Kontroll av sug i behandlingsrummen sker varje natt. Den övre gröna delen med tillhörande påse är av engångstyp och slängs mellan varje patient som använt den.

Kontroll av sugutrustning i behandlingsrum

Kontrollera att:

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

- sugen fungerar genom att starta den. Kontrollera att manometern går upp till minst – 60kPa när Y-röret hålls för.
- sugslangen är cirka två meter lång.
- det ligger 3 gröna /3 vita sugkateter i korgen på väggen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ortopedi

Innehållsansvar: Niklas Engström, (niken3), Sjuksköterska

Granskad av: Eva Olsson, (evaol42), Vårdenhetschef

Godkänd av: Hans Svensson, (hansv16), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10097-1869289359-272

Version: 1.0

Giltig från: 2026-02-03

Giltig till: 2028-02-03