

Gäller för: Käkkirurgimottagning NÄL

Innehållsansvar: Hossein Kashani, (hoska), Övertandläkare

Godkänd av: Mariana Murto, (mared23), Övertandläkare

Giltig från: 2025-09-26


Giltig till: 2027-09-24

# Wafermanual


Manualen visar stegen som görs efter att waferns utsträckning markerats på ocklusalytorna.

Det är viktigt att undgå genomslag eftersom småbitar resin då kan lossna under print och göra underhållet av resinet mer komplicerat.


Man minskar också risken för interferenser under op, om man inte har genomslag.

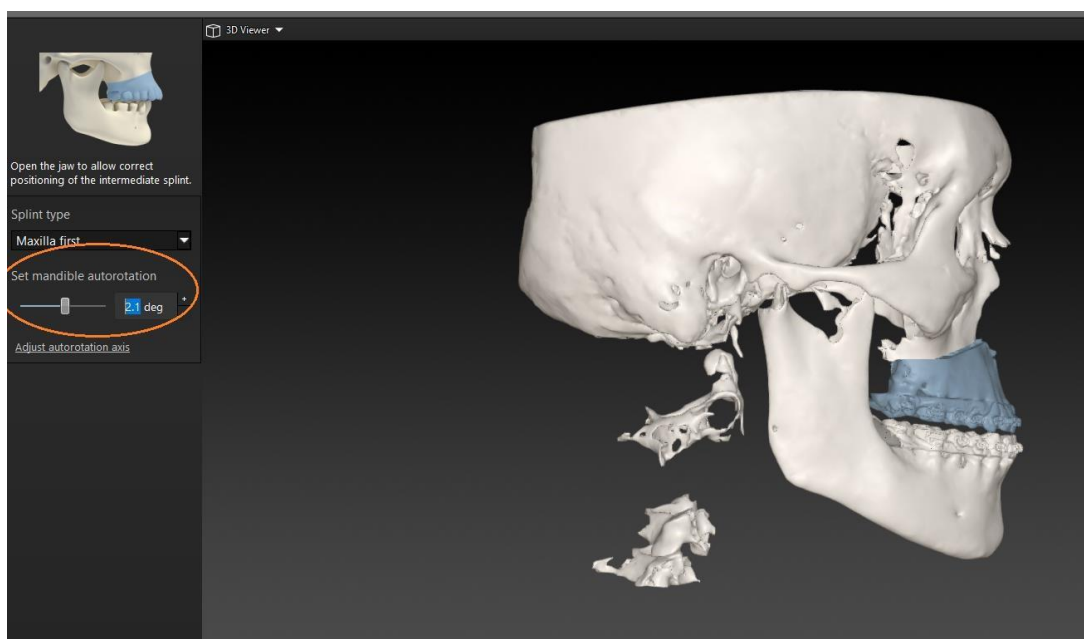

Ställ in autorotationen av mandibeln så att genomslag undgås. 1-3 grader räcker, beroende på ocklusionen.

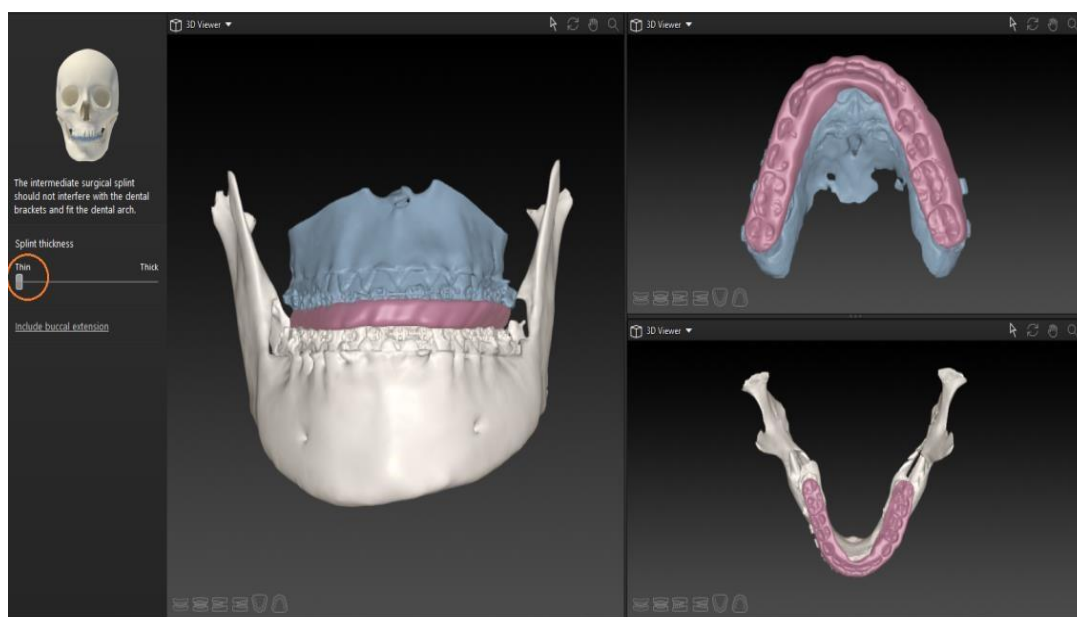


I de flesta fall är ”thin” fullt tillräckligt, och ger en mer lättarbetad wafer.

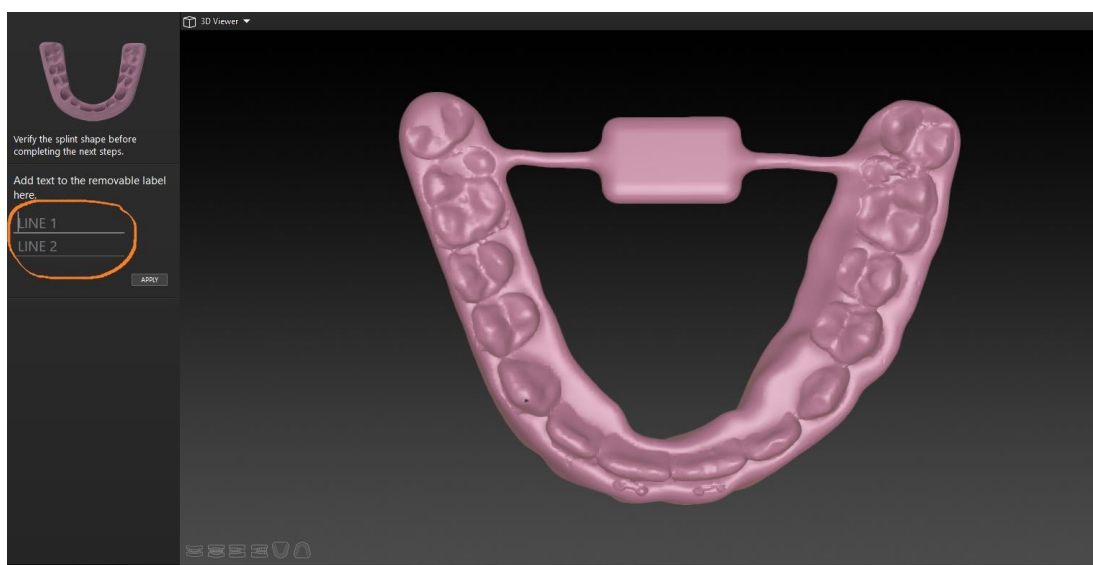


**Line 1: patientens namn**


**Line 2: kirurgens initialer**

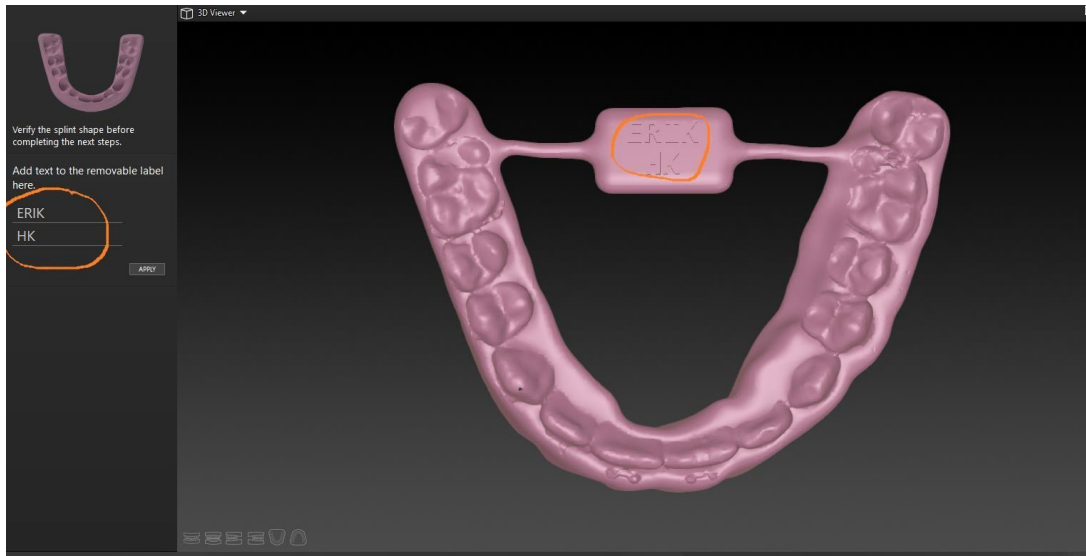


Detta för att säkerställa identifikationen av wafer när tsk putsar den efter print.

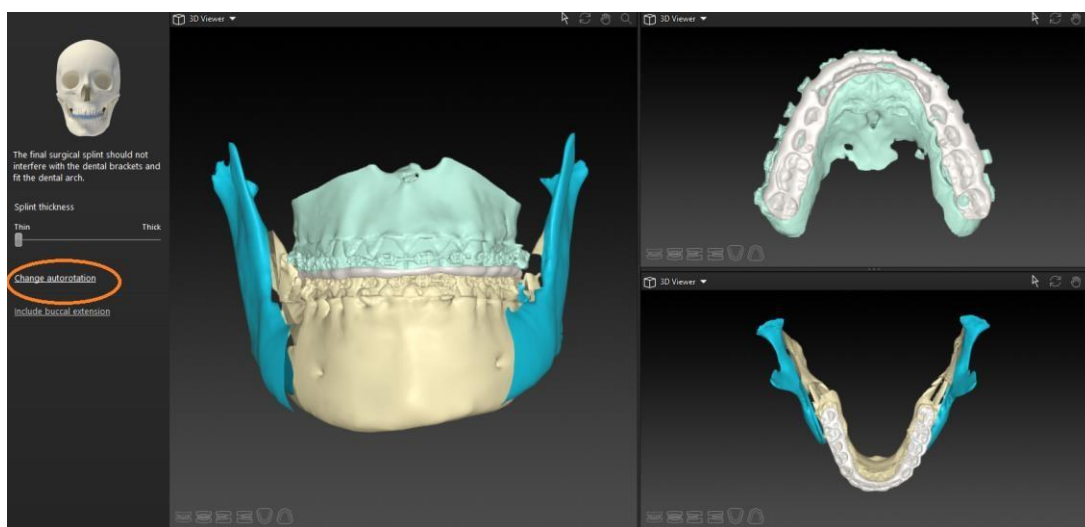

Samma förfarande av slutwafer, som ofta har många genomslag initialt. Ställ in tjockleken via "autorotation".

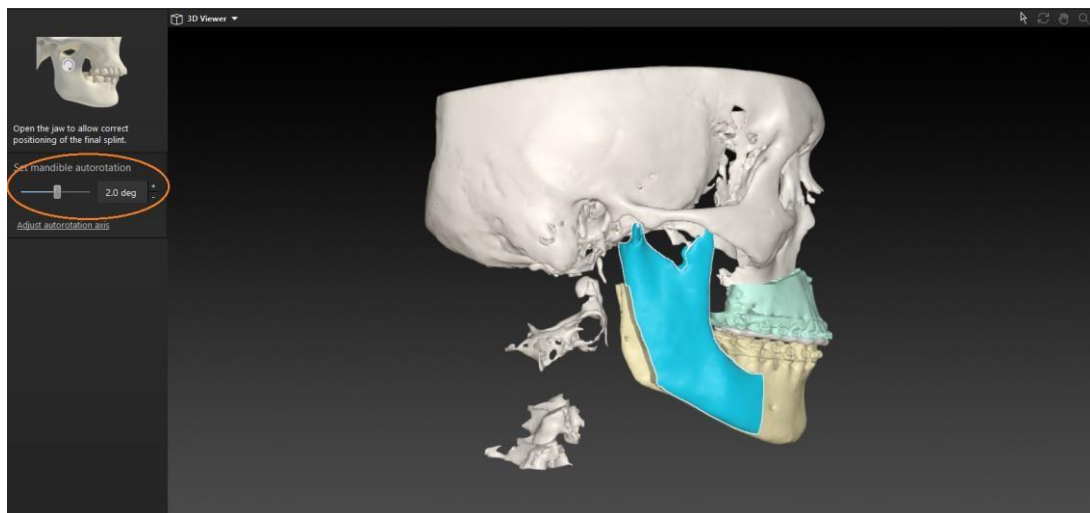


1-2 grader räcker ofta för att undgå genomslag.

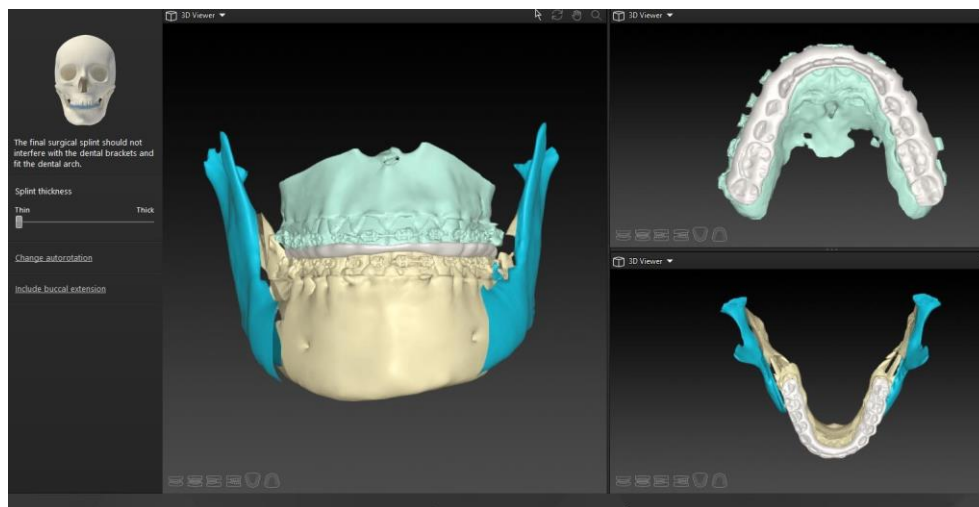


Behåll wafer på "thin"  
om möjligt.



Samma här:  
Line 1: patientens namn  
Line 2: kirurgens initialer

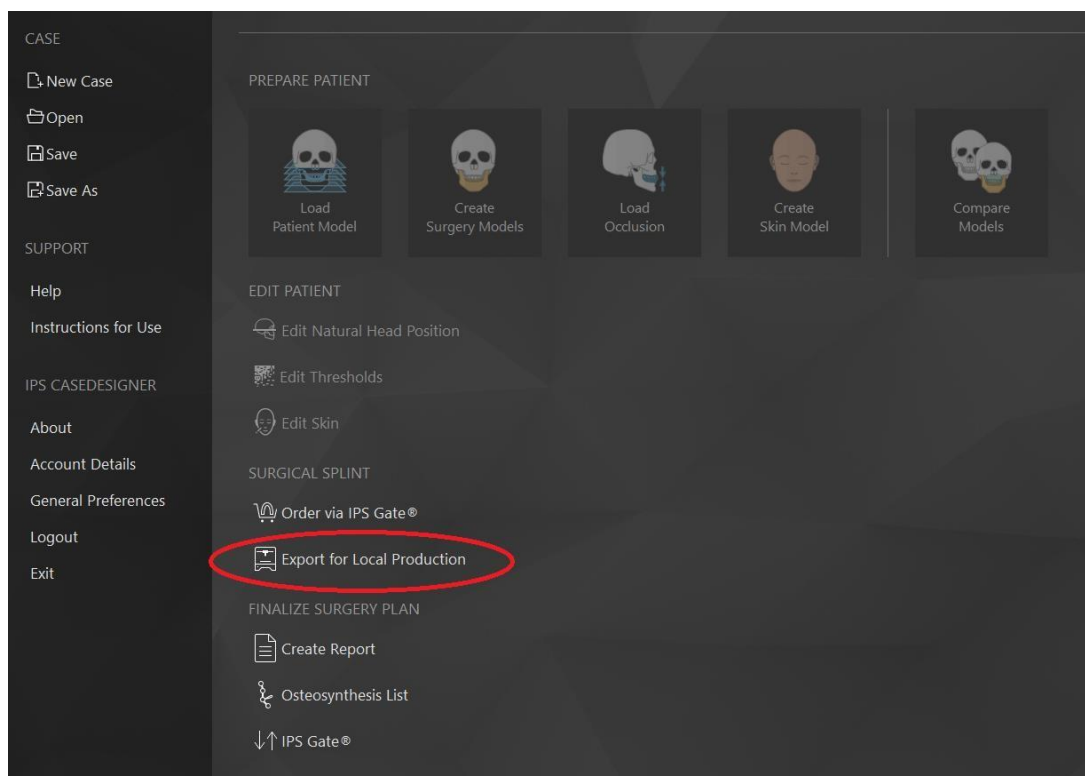

Istället för att beställa från KLS ("Order via IPS Gate") – välj "Export for local production"

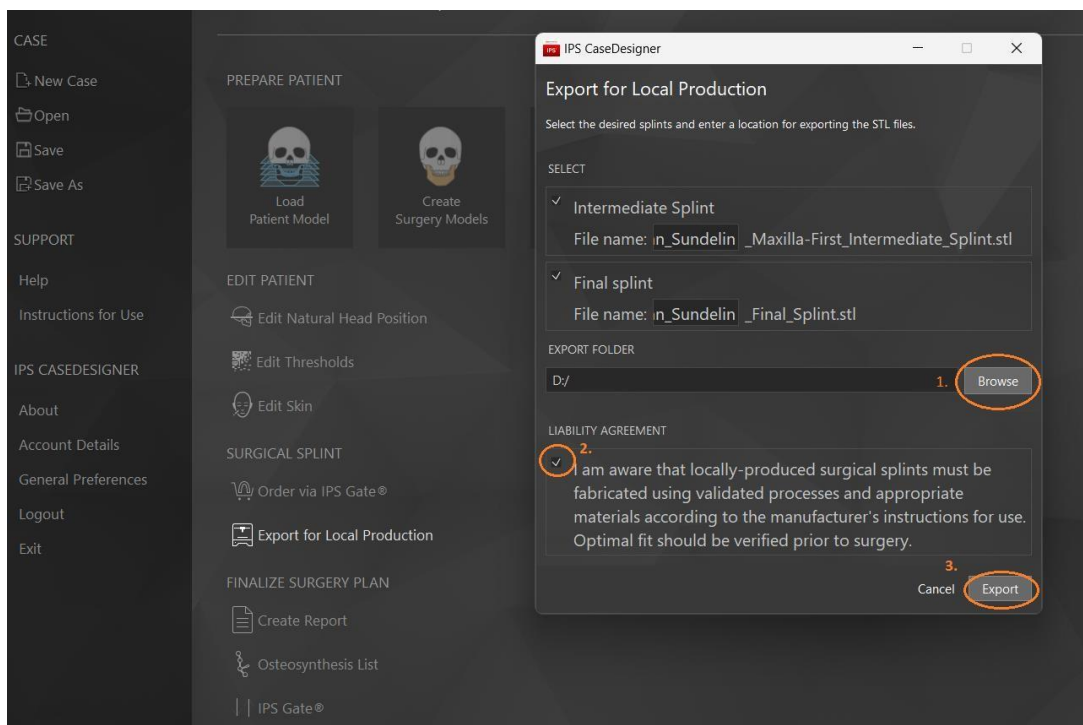

## 1. Browse

Välj det USB som använts för op-planeringen, där patientens filer från CBCT och intraoral scanning ligger.

## 2. Bocka i rutan

## 3. Exportera

- USB't ges till Anki, Helen eller Elin
- Print av en omgång wafers tar ca 3 timmar.  
Efterhärdning och puts tar ca 40-60 min.
- När wafern är klar läggs den i skåpet med patientens övriga modeller, och en notering görs i Melior av den tsk som har putsat den klart. (Anki, Helen eller Elin)
- Wafern slängs och wafer-data från USB och printer raderas i samband med patientens 6 v postop kontroll.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Käkkirurgimottagning NÄL

**Innehållsansvar:** Hossein Kashani, (hoska), Övertandläkare

**Godkänd av:** Mariana Murto, (mared23), Övertandläkare

**Dokument-ID:** NU10098-1854306902-26

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2025-09-26

**Giltig till:** 2027-09-24