

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Eva Axelsson, (evaax7), Teamledare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-08-25

Giltig till: 2027-08-04

Rengöring och hantering av ögoninstrument avd 3

Reviderat i denna version:

Hela rutinen är uppdaterad.

Mån – fre ansvarar ögonundersköterskan för att hämta ögoninstrument samt instrumentetiketter från avd 3 och fylla på med rena instrument.

Lör och sön är det undersköterskan på avd 3 som ansvarar för ögonpatienter – samlar in ögoninstrument och rengör enligt nedan.

Alla instrument:

- Spara instrumentetiketten och lägg tillsammans med de rengjorda instrumenten.
- Kör alla instrument i ultraljud och skölj av dem i vatten. Lägg instrumenten på en torkduk för att torka.
- Spolkanyl (tårvägsset) – blås ut med spruta innan den läggs på tork.
- När instrumenten är torra läggs de tillsammans med etiketterna i en pappersrondskål och sedan i en plastpåse. Lämnas på Ögonrummet och hämtas av ögons personal.
- Kornealborr (stiftet) är engångs och slängs i stickande/skärande. Handtaget spritas med ytdesinfektion.

Linser och pelotter:

- Omedelbart efter användning ska eventuella rester av Viscotears på linsen sköljas bort med ljummet vatten och därefter tvättas med flytande tvål.
- Skölj noga.
- Lägg lins, med kontaktytan uppåt och pelotter på en torr kompress. Använd en ren avställningsyta som rostfri vagn eller hylla.
- Spraya Tristel Duo så det täcker alla ytor ordentligt.
- Låt ytan torka för att säkerställa minst 30 sekunders kontakttid, skummet försvinner.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

- Skölj linser och pelotter för att få bort eventuella rester av desinfektionsskum.
- Låt lufttorka eller torka torrt med ren kompress.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Eva Axelsson, (evaax7), Teamledare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10102-675416934-253

Version: 17.0

Giltig från: 2025-08-25

Giltig till: 2027-08-04