

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus  
Innehållsansvar: Helén Persson, (helpe7), Sjuksköterska  
Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Giltig från: 2024-07-10

Giltig till: 2026-07-10

# Stereotest

## Syfte

Säkerställa exponeringsautomatik och bildkvalitet.

## Apparatur


Siemens Mammomat Revelation

## Montera stereoutrustning

Se anvisning [Stereotest – Montering av bord med tillbehör](#).

## SYNGO

1. Välj Local Database
2. Markera AAAAA Stereotest + andra kuvertet
3. Välj Patient i listen
4. Klicka på Register
5. Ett grått ifyllt formulär kommer fram
6. Klicka på Exam
7. Välj Procedure Stereo right/Stereo left
8. *Var uppmärksam på eventuella meddelande nedtill vänster på skärmen/blå list. Följ instruktionerna som visas på skärmen.*

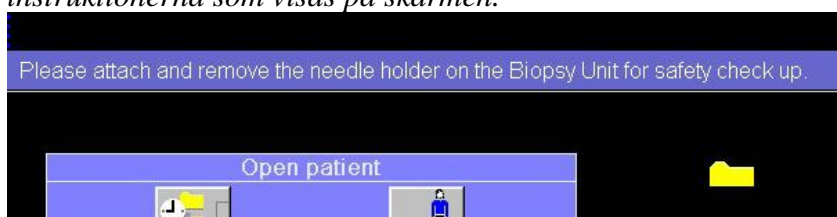


9. Dubbelklicka på första bilden = scoutbild
10. Exponera
11. Godkänn bilden genom OK
12. Stereoparet startar automatiskt
13. Exponera  
Röret vinklar sig automatiskt  $\pm 15^\circ$ .  
Håll inne exponeringsknappen tills båda exponeringarna är klara.

## Sätt referenspunkt

1. Välj Referens point (längst ned till vänster)
2. Börja med vänster bild
3. Sätt korsen mitt i varandra.
4. Gör likadant med höger bild
5. Tryck Confirm

## Sätt Mål/Target

1. Markera en punkt i kanten på stiftet på vänster bild.
2. Markera likadant på höger bild, Om det blir svårt att se – högerklicka i bilden och välj Zoom from point, vänsterklicka för att förstora bilden.  
Tryck på Esc för att få bort förstoringsglasat så att du kan flytta korset.  
Återgå till ursprunget: högerklicka och välj Home zoom pan.  
Tryck Confirm längst ned till vänster
3. Välj aktuell nål Calibration needle är förvald.
4. Markera siffrorna som står i rutan (vänster nedre hörn)
5. Transmit
6. Bekräfta nålval igen
7. Biopsienheten ställer in sig på målet
8. Montera nålförare med bushings
9. Sätt i nålen som ska stämma överens med target.

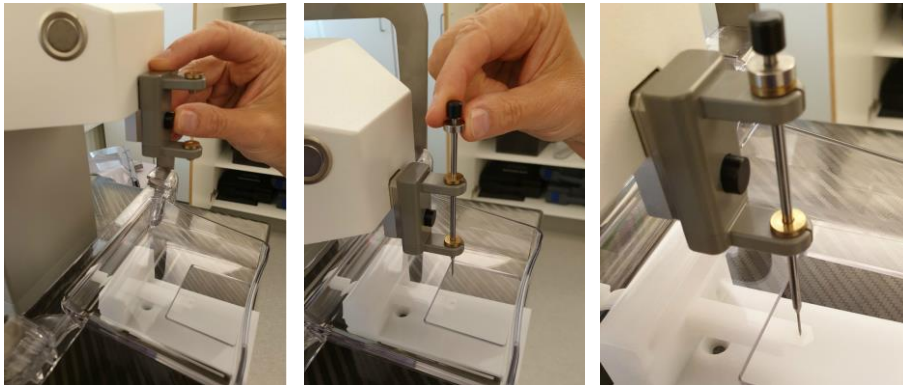

10. Stäng undersökningen i SYNGO.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Mammografienhet Uddevalla sjukhus

**Innehållsansvar:** Helén Persson, (helpe7), Sjuksköterska

**Godkänd av:** Maria Edegran, (mared2), Överläkare

**Dokument-ID:** NU10129-1374965483-56

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2024-07-10

**Giltig till:** 2026-07-10