

Radera AAA Veckokontroll Tomosyntes

Syfte

Rutin för radering.

Förändring sedan föregående version

Ny rutin.

Tillvägagångssätt

Radera alla stackar förutom de senaste med dom högsta siffrorna dvs:

- TOMO R-CC, Standard_Proj, Phantom
- T_PR R-CC, Phantom
- T_PR_raw R-CC, Phantom

Radera inte - Radiation Dose Structured Report


Markera dem som ska raderas

- Tryck på Delete
- Grå ruta kommer upp, tryck Yes
- Nästa grå ruta, tryck Yes to All


OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Se bilder före och efter radering nedan:

FÖRE

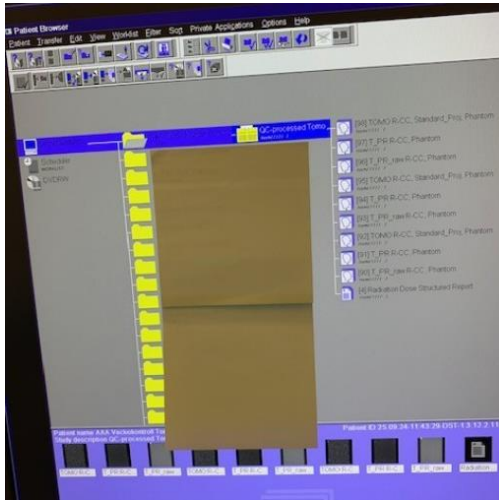

EFTER

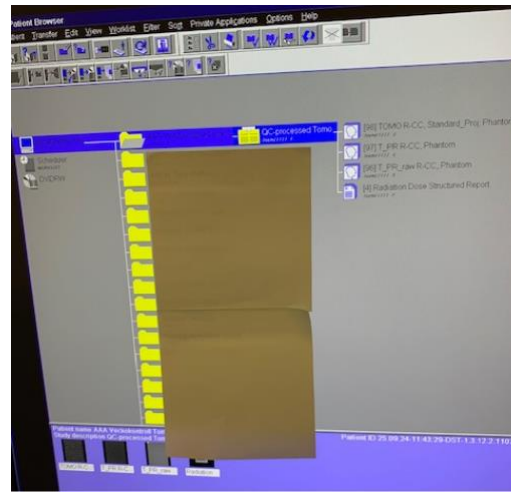

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska

Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Dokument-ID: NU10129-1374965483-59

Version: 1.0

Giltig från: 2026-06-25

Giltig till: 2028-06-25