

Skapa Tomotest/Stereotest

Syfte


Säkerställa exponeringsautomatik och bildkvalitet.

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin.

Tillvägagångssätt

1. Gå till listen – Välj patient och sedan Register.

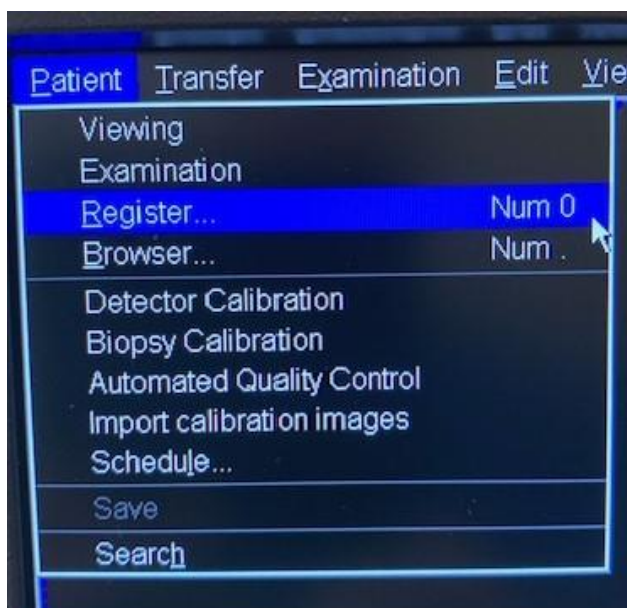

2. Kolumnen Patient till vänster
 - a. Last name – fyll i AAAAA Tomotest/Stereotest
 - b. Date of birth – fyll i dagens datum (åååå-mm-dd)
 - c. Sex – Klicka i Other
3. Kolumnen Procedure till höger
 - a. Study – Välj Tomobiopsi right

Patient Registration

PATIENT

Last name AAAAA Tomotest/Stereotest

First name

Middle name

Title Suffix

Other patient name(s)

Other patient ID(s)

Ethnic group

Military rank

Patient ID

Date of birth 2026-06-23 [yyy-MM-dd]

Sex Male Female Other

Age 1 Days

Height ft in

Weight lbs oz Metric

Address

Additional info

Details...

PROCEDURE

Accession No

Request ID

Requested procedure(s) Tomobiopsi Right

Study list Tomobiopsi Right

Add Delete

Study Tomobiopsi Right

Study comment

Patient position

INSTITUTION

Institution name

1. Performing physician

2. Performing physician

1. Operator

2. Operator

HOSPITAL

Referring physician

Requesting physician

Admitting diagnosis

Ward

Admission ID

Preregister Exam Search Cancel Help

ISO_IR 100

4. Exam

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska

Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Dokument-ID: NU10129-1374965483-60

Version: 1.0

Giltig från: 2026-06-25

Giltig till: 2028-06-25