

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska

Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Giltig från: 2025-06-11

Giltig till: 2027-06-11

# Fel placering av projektionsmärkning vid Konbild

## Syfte

Korrigerig utförs på rätt sätt.

## Förändringar i denna version

Inga förändringar.

## Rättning av fel placering av projektionsmärkning vid Konbild under pågående undersökning

### SYNGO

- Gå in i aktuell bild/Images och högerklicka för att få upp fyra val
- Välj Reprocess – ta bort boken i Display Markers
- Klicka OK

### Skriv in rätt märkning

- Tryck på Tools (i listen)
- Markera Annotate = XYZ (med muspekaren)
- Kicka i bilden – Skriv in rätt markering
- Enter
- Spara genom att gå in på Patient (i listen) och därefter Save
- Gå tillbaka till Tools för att avmarkera Annotate

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Mammografienhet Uddevalla sjukhus

**Innehållsansvar:** Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska

**Godkänd av:** Maria Edegran, (mared2), Överläkare

**Dokument-ID:** NU10129-1655924590-18

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2025-06-11

**Giltig till:** 2027-06-11