

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus  
Innehållsansvar: Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska  
Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Giltig från: 2025-03-05

Giltig till: 2027-03-05

# Felmärkt projektion – bilderna skickade till PACS

## Syfte

Korrigerings utförs på rätt sätt.

## Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar..

## Rättning av felmärkt projektion när bilderna skickats till PACS

- Kontakta ansvarig radiolog och meddela misstaget.

## SYNGO

- Kontrollera att bilderna finns i SYNGO.
- Ta fram kvinnan/patienten i Lokala Databasen – klicka Reenter.
- Högerklicka på bilden (Image) och välj Correct.
- Välj vilken projektion du vill ändra till.
- En fråga kommer upp ”Shall the image be changed from projection view... to projection view...?” Svara Yes.
- Informationsruta visas att felaktiga bilder finns fortfarande kvar i PACS
- Gör på samma sätt med övriga bilder som är felaktiga.
- Stäng undersökningen i SYNGO.

## PACS

- Dokumentera misstaget i PACS.
- De bilder som är felaktiga ska slängas i PACS. Ring sekreterare/bildhanterare eller PACS-administratör.
- Se till att allt är rätthängt i PACS.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Mammografienhet Uddevalla sjukhus

**Innehållsansvar:** Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska

**Godkänd av:** Maria Edegran, (mared2), Överläkare

**Dokument-ID:** NU10129-1655924590-19

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2025-03-05

**Giltig till:** 2027-03-05