

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus
Innehållsansvar: Carina Bjelkengren, (carb), Sjuksköterska
Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Giltig från: 2025-12-16

Giltig till: 2027-12-16

Kalibrering – Faxitron

Syfte

Upprätthålla bildkvaliteten.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.


Åtgärder

Kalibrering utförs dagligen innan användning av Faxitron.

Ansvarig: Tidbokssjuksköterska

Kalibrera

1. Starta datorn och vrid nyckeln enligt bild.
- 2.

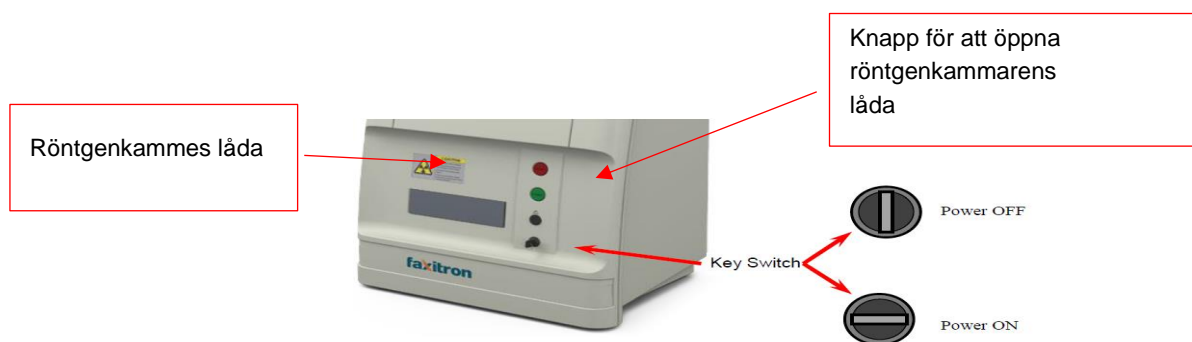

3. Låt systemet vara på i 30 minuter innan kalibrering påbörjas.

4. Kontrollera att röntgenkammarens låda är tom.

5. Dubbelklicka på  och startsidan visas.

6. Dubbelklicka på ”Calibrate”



7. Klicka på ”Start Calibration”
utförs.



och kalibreringen

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska

Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Dokument-ID: NU10129-1655924590-25

Version: 4.0

Giltig från: 2025-12-16

Giltig till: 2027-12-16