

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus
Innehållsansvar: Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska
Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Giltig från: 2025-06-11
Giltig till: 2027-06-11

Reservrutin Manuell registrering – Siemens Mammomat Revelation

Sammanfattning/syfte


Reservrutin som träder i kraft när systemet PACS inte fungerar.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Manuell registrering av persondata på Mammomat Revelation

- Gå till listen – välj Patient och sedan Register

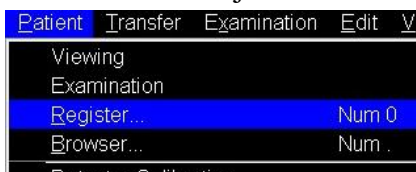

- Fyll i namn och personnummer enligt bild
Efternamn
Förnamn
Patient ID – 10 siffror
Date of birth – ÅÅÅÅ-MM-DD

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

The screenshot shows a 'Patient Registration' window with a blue header and a vertical 'PATIENT' label on the left. The form contains the following fields: Last name (xxxxx), First name (xxxxx), Middle name, Title, Suffix, Other patient name(s), Other patient ID(s) (with a dropdown arrow), Ethnic group, Military rank, Patient ID (xxxxxxxx), and Date of birth (xxxx-xx-xx [yyyy-MM-dd]).

- Klicka på Exam



- Kontakta PACS-administratör för vidare handläggning.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska

Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Dokument-ID: NU10129-1655924590-49

Version: 4.0

Giltig från: 2025-06-11

Giltig till: 2027-06-11