

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus
Innehållsansvar: Helén Persson, (helpe7), Sjuksköterska
Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Giltig från: 2025-06-11

Giltig till: 2027-06-11

Reservrutin Manuell registrering – Ultraljud Canon Aplio i700

Sammanfattning/syfte


Reservrutin som träder i kraft när systemet PACS inte fungerar.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar i texten.

Manuell registrering av persondata på Ultraljud Canon Aplio i700

- Välj Patient ID
- Fyll i personnummer och namn enligt bild
 - Patient ID – 10 siffror
 - Efternamn
 - Förnamn
 - Accession number NU mam
- Klicka på Start

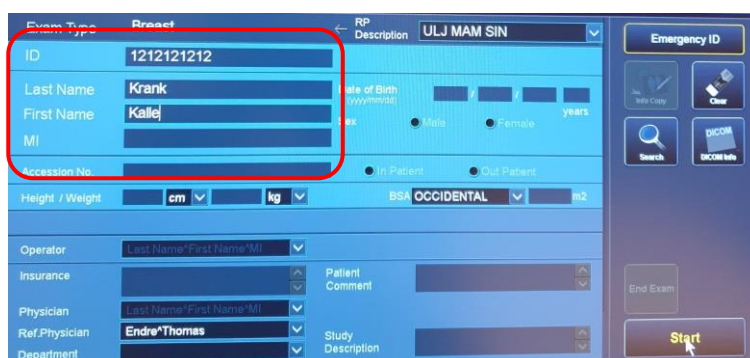

- Kontakta PACS-administratör för vidare handläggning.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Helén Persson, (helpe7), Sjuksköterska

Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Dokument-ID: NU10129-1655924590-50

Version: 5.0

Giltig från: 2025-06-11

Giltig till: 2027-06-11