

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus
Innehållsansvar: Helén Persson, (helpe7), Sjuksköterska
Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Giltig från: 2025-10-10
Giltig till: 2027-10-10

Skapa vecko-kontroll Tomocytntes i SYNGO

Syfte


Daglig kontroll utförs för att säkerställa exponeringsautomatik och bildkvalitet.

Förändringar i denna version

Små förändringar.

Åtgärder

1. Gå till listan – välj Patient och sedan Register

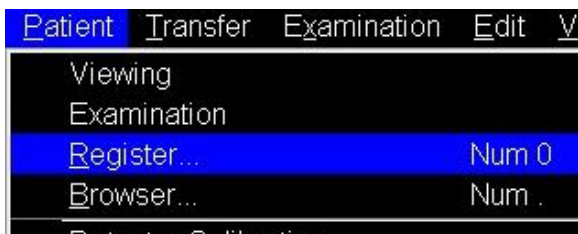

2. Kolumnen PATIENT till vänster
 - Last name – fyll i Daglig kontroll Tomo
 - Date of birth – fyll i dagens datum (åååå-mm-dd)
 - Sex – Klicka i Other

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

- 3. Kolumnen Procedure till höger
 - Study – Välj Daglig QC-processed Tomo

The screenshot shows a registration form with several sections: PATIENT, PROCEDURE, INSTITUTION, and HOSPITAL. Red boxes highlight the following fields:

- Last name:** AAA Veckokontroll Tomosyntes
- Date of birth:** 2025-10-08 [yyyy-MM-dd]
- Age:** 1 Days
- Study:** QC-processed Tomo

Other visible fields include First name, Middle name, Title, Suffix, Other patient name(s), Other patient ID(s), Ethnic group, Military rank, Patient ID, Accession No, Request ID, Requested procedure(s), Study list, Add, Delete, Study comment, Patient position, Institution name, 1. Performing physician, 2. Performing physician, 1. Operator, 2. Operator, Referring physician, Requesting physician, Admitting diagnosis, Ward, Admission ID, and buttons for Reregister, Exam, Search, Cancel, and Help.

4. Exam

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Helén Persson, (helpe7), Sjuksköterska

Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Dokument-ID: NU10129-1655924590-53

Version: 7.0

Giltig från: 2025-10-10

Giltig till: 2027-10-10