

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus
Innehållsansvar: Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska
Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Giltig från: 2025-04-09
Giltig till: 2027-04-09

Stereotest/Tomosyntestest – Montering av bord med tillbehör

Syfte

Handledning för montering av bord med tillbehör vid stereotest.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Arbetsplats

Siemens Mammomat Revelation

Tillbehör

- Stereobord
- Kompressionsenhet
- Fantom
- Nålhållare
- Kalibreringsnål
- 1 stift
- 2 bushings
- Ansiktsskydd

Montera stereobordet.

1. För in bordet tills du hör ett klickljud



2. Sätt kontakten i spåret och för till vänster




3. Placera handkontroll på stativet



4. Sätt på kompressionsenheten



5. Placera fantomen enligt bild

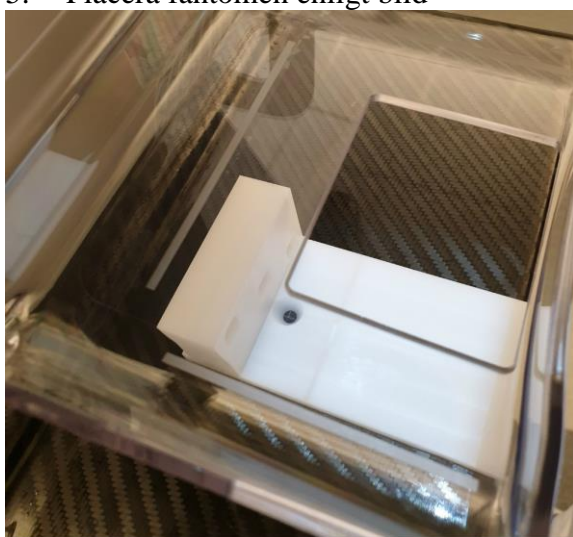

6. Markering på detektorn ska vara centrerat i hålet på fantomen.
Sätt ett stift i mittenpositionen på fantomen.



7. Komprimera lätt så att fantomet sitter på plats mot stereobordet




Utför Stereotest/Tomosyntest


Se metodbok.

Montera nålförare och nål


8. Montera 2 st bushings på nålföraren

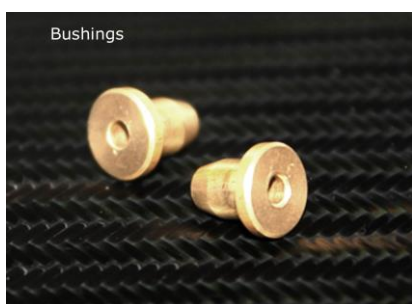


9. Sätt på nålföraren med bushings

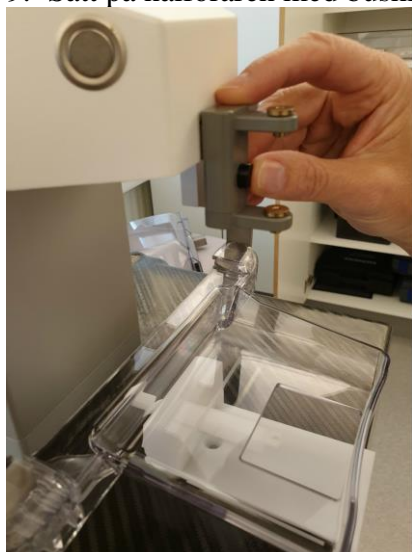

10. För därefter in kalibreringssnålen i nålföraren

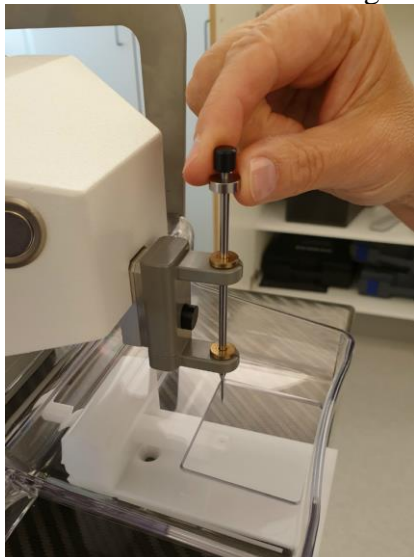

11. För ned nålen så att den överensstämmer med Mål/Target

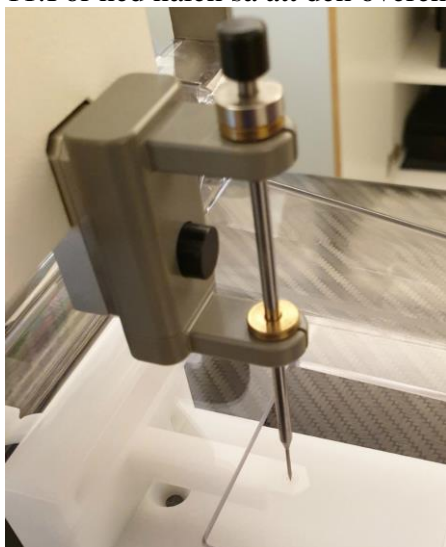

12. Ett speciellt ansiktsskydd (1) måste användas vid biopsier i tomosyntes.
Ansiktsskydd (2) används vid stereotaxipunktion.



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska

Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Dokument-ID: NU10129-1655924590-56

Version: 4.0

Giltig från: 2025-04-09

Giltig till: 2027-04-09