

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska

Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Giltig från: 2026-06-22

Giltig till: 2028-06-22

Tomosyntestest/stereotest

Syfte

Säkerställa exponeringsautomatik och bildkvalitet.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, bytt till Tomotest/Stereotest.

Apparatur


Siemens Mammomat Revelation

Montera stereoutrustning

Se anvisning [Stereotest/Tomosyntestest – Montering av bord med tillbehör](#).


SYNGO

1. Välj Local Database
2. Markera AAAAA Tomotest/Stereotest + andra kuvertet
3. Välj Patient i listen
4. Klicka på Register
5. Ett grått ifyllt formulär kommer fram
6. Klicka på Exam
7. Välj Procedure Tomobiopsi Right/Left
8. *Var uppmärksam på eventuella meddelande nedtill vänster på skärmen/blå list. Följ instruktionerna som visas på skärmen.*

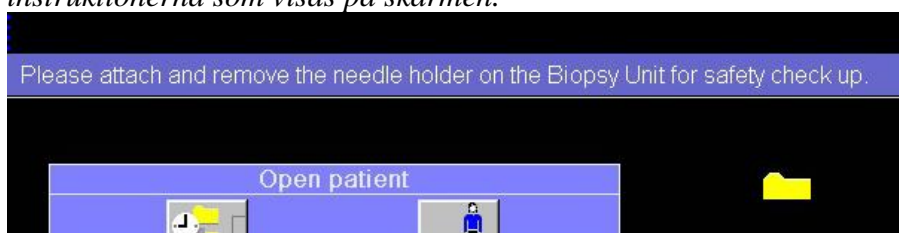


9. Dubbelklicka på första bilden = scoutbild
10. Exponera
11. Godkänn bilden genom OK

12. Tomoscouten aktiveras.
13. Exponera. Håll inne exponeringsknappen så länge ljudsignal hörs.
14. Tomoscoutens snitt visas, bläddra i stacken tills bilden är tydlig genom att hålla muspekaren på pilen i lodräta listen för att skrolla bilden.
15. Referenspunkten och referenskorset måste överensstämja. Tryck på Ref Point.
Vid behov måste referenspunkten justeras. Om det är svårt att se – högerklicka i bilden och välj Zoom from point. Tryck på Esc för att få bort förstoringsglaset så du kan flytta korset. Återgå till ursprunget – höger klicka och välj Home zoom pan.

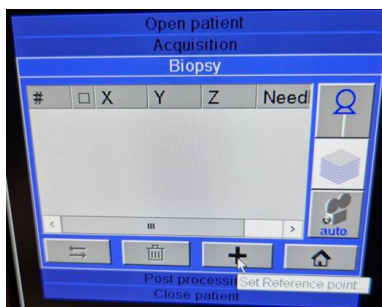

16. Tryck Confirm

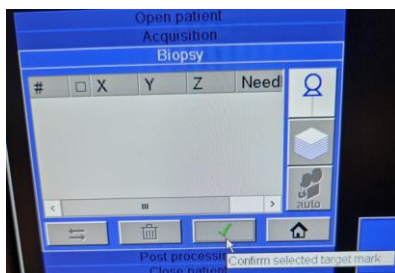


17. Sätt target i hålet på stiftet.
18. Tryck Confirm längst ner till vänster.
19. Calibration needle är förvald som aktuell nål. Kontrollera i Acquisition att rätt nål är vald.
20. Markera siffrorna som står i rutan (vänster nedre hörn). Återgå till Biopsy.
21. Transmit.



22. Bekräfta nålval igen.
23. Biopsienheten ställer in sig på målet.
24. Montera nålhållare och bushings.

25. Sätt i nålen, som ska stämma överens med target.

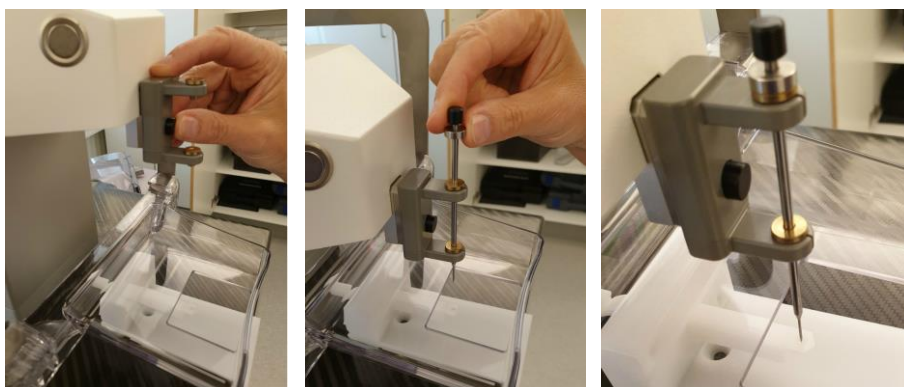

26. Dubbelklicka och exponera stereoparet – håll inne exponeringsknappen under tiden röntgenröret rör sig ± 15 grader.

27. Sätt mål/target.

28. Markera en punkt på vänster bild.

29. Markera likadant på höger bild. Om det blir svårt att se – högerklicka i bilden och välj Zoom from point, vänsterklicka för att förstora bilden. Tryck på Esc för att få bort förstoringsglasat så att du kan flytta korset. Återgå till ursprunget: högerklicka och välj home zoom pan.

30. Tryck Confirm längst ner till vänster.

31. Calibration needle är förvald som aktuell nål.

32. Markera siffrorna som står i rutan (vänster nedre hörn).

33. Transmit och bekräfta nålval.



34. Biopsienheten ställer in sig på målet.

35. Montera nålförare med bushings.

36. Sätt i nålen som ska stämma överens med target.

37. Ta bort nål och nålhållare avsluta sedan testet.

38. Bocka i Skip EndExam Transfer Rules för att bilderna inte ska gå över till PACS.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska

Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Dokument-ID: NU10129-1655924590-65

Version: 6.0

Giltig från: 2026-06-22

Giltig till: 2028-06-22