

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus  
Innehållsansvar: Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska  
Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Giltig från: 2025-03-05  
Giltig till: 2027-03-05

# Undersökning utförd på fel patient-ID i SYNGO/PACS

## Syfte

Korrigerings utförs på rätt sätt.

## Förändringar i denna version

Inga förändringar.

## Undersökningen är redan startad och stoppad på fel kvinna/patient PACS

- Gå till undersökningsfönstret
- Redigera – ta bort starttid, stopptid, ansvarig sjuksköterska och datum. Spara.
- Utför undersökningen som vanligt
- Dokumentera i Remissanteckningar att undersökningen var startad och stoppad på fel kvinna/patient.

## Undersökningen har status "Arrived" i SYNGO - undersökningen är redan utförd på fel kvinna/patient

### SYNGO

- Markera rätt kvinna/patient i Lokala Databasen.
- Reentra undersökningen.
- Lägg till aktuella bilder och utför undersökningen.

### Särskilj de rätta bilderna genom att

- Markera Annotate = X, Y, Z med muspekaren
- Markera nu de rättmärkta bilderna med t ex 1, 2, 3, 4
- Enter
- Spara genom att gå in på Patient i listen och därefter Save
- Gå tillbaka till Tools för att avmarkera Annotate
- Stäng undersökningen i SYNGO

### PACS

- Flagga undersökningen i PACS i undersökningsfönstret/markera som/flaggor/PACS adm VGR till "PACS adm." och skriv vad som behöver rättas i remissanteckningarna t ex "*Kvinnan har felaktiga bilder i PACS men bilder som är märkta med 1, 2, 3, 4 tillhör rätt ID.*"
- Kontakta alltid PACS-administratör ska alltid ska rätta i PACS. Om det inte går att få tag på PACS-administratör via telefon mejla dem.
- Kontakta även avdelningen/bildhanterare så ingen läkare granskar den felaktiga undersökningen.
- Radera de felaktiga bilderna i SYNGO efter godkännande från PACS-administratör.
- Lokala databasen
- Markera rätt kvinna/patient i första gula kuvertet, klicka i menyraden "Delete"
- Dokumentera på båda kvinnorna i remissanteckning i RIS: "*Patienten röntgad på fel ID initialt. Rättat i PACS/IDS7, raderad på modalitet, bilderna finns alltså enbart i PACS/IDS7.*"

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Mammografienhet Uddevalla sjukhus

**Innehållsansvar:** Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska

**Godkänd av:** Maria Edegran, (mared2), Överläkare

**Dokument-ID:** NU10129-1655924590-76

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2025-03-05

**Giltig till:** 2027-03-05