

Att koppla Extraneal till Stay-Safe

Maskinpåse (APD)

- Använd StaySafe Luer Lock set.
- Tvätta händerna.
- Öppna förpackningarna, Extraneal och StaySafe Luer Lock setet.
- Häng upp Extranealpåsen.
- Placera StaySafe-kopplingen i hållaren.
- Sprita händerna!
- Avlägsna sterilskydden på StaySafe Luer Locksetet och på Extranealpåsen.
- Skruva ihop StaySafe Luer Locksetet med Extranealpåsen.
- Bryt det gröna stiftet i Extranealslangen.
- Följ nu StaySafes träningsmanual.
- I spolfasen, låt all luft i slangen gå ner i tompåsen (en lite längre spolfas). Spola ev. ut cirka 500 ml vätska (beroende på patientens ordination) alternativt spara 500 ml i Extranealpåsen vid påfyllning då påsarna är på 2500 ml.

Manuell påse (CAPD)

- Använd Stay-Safe Luer Lock set.
- Tvätta händerna.
- Öppna förpackningarna, Extraneal och Stay-safe Luer Lock setet.
- Häng upp Extranealpåsen.
- Sätt blå klämma på urtappningsslangen till Extraneal- tompåsen.
- Placera StaySafe-kopplingen i hållaren.
- Sprita händerna!
- Avlägsna sterilskydden på StaySafe Luerlocksetet och Extranealpåsen.
- Skriva ihop StaySafe Luerlocksetet med Extranealpåsen.
- Bryt det gröna stiftet i Extranealslangen.
- Följ nu StaySafes träningsmanual.
- I spolfasen, låt all luft i slangen gå ner i tompåsen (en lite längre spolfas).