



Information NRFit

Datum

Uppdaterad: 2024-09-23

Frågor och svar om införandet av NRFit i VGR

FRÅGA: Hur hittar jag NRFit-produkter i Marknadsplatsen?

SVAR: Ange: **NRFit** i sökfältet i Marknadsplatsen. Kontrollera i sortimentsvägledningen.

FRÅGA: Det saknas en del produkter som vi använder idag inom det berörda området, varför?

SVAR: Vissa produkter finns inte tillgängliga (eller inte i ett heltäckande sortiment) på Marknaden. Exempel på förbrukningsmaterial som i dagsläget saknas:

Portnål för subkutan intratekal port

Spinal/Lumbaldränage/Ventikeldränage

Epiduralkanyler i dimensioner om 14Gauge

Förlängningsslangar i olika dimensioner. För närvarande endast 200cm sprutpumpsslang i NRFit tillgängligt. Ansträngningar görs för att hitta fler varianter.

FRÅGA: Finns produkter tillgängliga i NRFit-utförande avsedda för Epiduralinfusion med Fresenius volympumpar?

SVAR: Nej. Fresenius har inte framställt pumpaggregat med NRfit-koppling.

Läs bilagan på Vårdgivarwebben. [Ny standardkoppling för spinal, epidural och nervblockad - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen \(vgregion.se\)](#) Fresenius hänvisar till infusion med Sprutpump alternativt med CADD-pump.

FRÅGA: Hur hanterar vi överblivna produkter? Produkter som utgår och inte ska användas längre?

SVAR: Utgående produkter kan returneras till Sisjödepån enligt ordinarie rutin och överblivna produkter kommer att doneras till hjälporganisation. Varuvärdet krediteras inte.

[Retursedel \(vgregion.se\)](#)

FRÅGA Hur gör jag när jag beställer apotekstillverkade cytostatika eller annat extemporeläkemedel för att säkerställa att det blir rätt koppling?

SVAR: Från och med v. 39 ska det, under en övergångsperiod, vid varje beställning anges vilken koppling man önskar för beredningar beställda för spinal/intratekal respektive epiduraladministrering; NRfit- eller luerkoppling.

I Cytobase ska det anges som en beställarkommentar och vid faxbeställning anges det tydligt på faxet. Vid avsaknad av denna kommentar kommer tillverkningsenheten att kontakta beställare för att säkerställa att rätt koppling blir vald.

Efter övergångsperioden kommer beredningar för spinal/intratekal respektive epiduraladministrering att levereras med NRfit koppling om inte annat anges vid beställning.

Vid beställning via fax är alltid det mycket viktigt att administreringsvägen framgår.


Om det blir aktuellt med extemporeläkemedel för andra administrerings sätt som omfattas av NRfit än spinal/intratekalt och epiduralt ska det på beställningen tydligt framgå att det ska vara NRfit-koppling

FRÅGA: Hur genomförs produktutbytet när avdelningen har MIV 2.0?

SVAR: Om er avdelning försörjs med produkter via MIV 2.0, kommer utbyte av produkter ske i samarbete med ansvarig MIV-samordnare. Ni behöver inte komma in med en förändringsbegäran, ansvarig samordnare kommer att kontakta berörda verksamheter. Planera beställning av NRFit-produkter och utfasningen av sortiment som kommer utgå. Produkterna beställs via Marknadsplatsen, samtliga produkter som tillhör NRFit-standard kan sökas upp med hjälp av prefix "NRFit".

FRÅGA: Är alla NRFit-produkter gulmärkta/gulmarkerade

SVAR: Nej. De flesta är gulmärkta men exempelvis spinalkanyler följer ordinarie färgkodning efter dimension. Kontrollera och säkerställ produkten och förpackningens märkning.

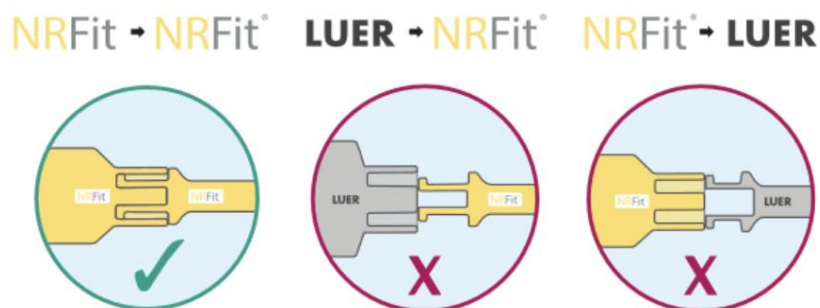

Kontaktpersoner:

Projektledare NRFit:

Anders Enskog

anders.enskog@vgregion.se

Frågor om NRFit-sortiment, upphandling/inköp kontakta:

Materialkonsulent

Pär Börjesson

Koncerninköp VGR

par.borjesson@vgregion.se

Tfn: 0700-824816