


Lathund- Direkt åtkomst akuta undersökningar i Melior

Externa undersökning som skickats till
SU



Lathund nytt uthopp-Melior

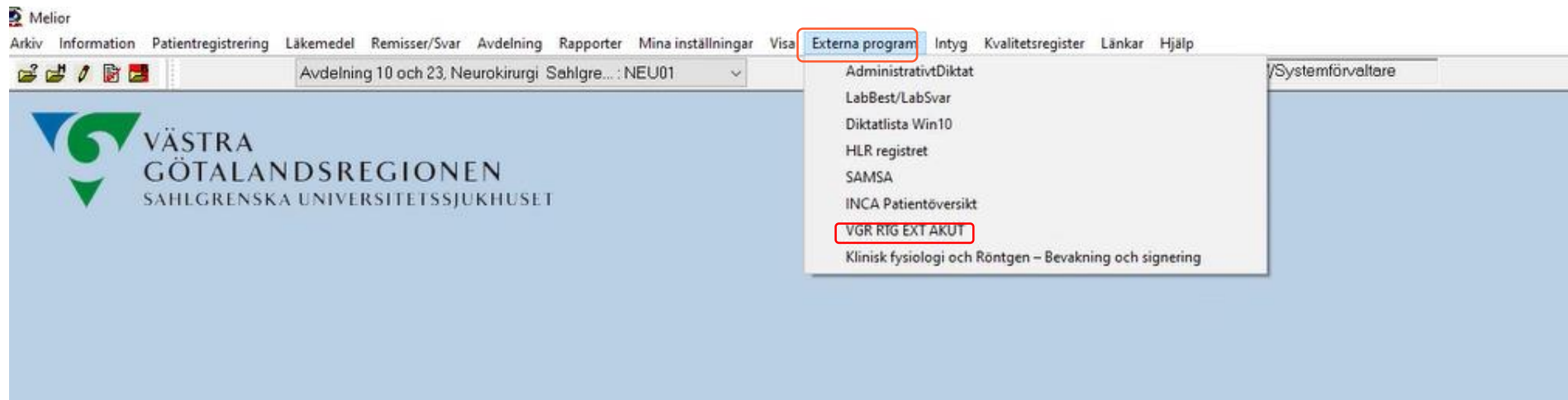

1. Användaren är inloggad i Melior som användare
2. Gå till externa program och välj länk **VGR RTG EXT AKUT**
3. Nu öppnas patientvyn i bildvisaren Xero Stand alone.
OBS arbetslistan är tom ifrån start!!!
4. Expandera webbfönstret så den fyller hela skärmen

Lathund nytt uthopp-Xeros stand alone

The screenshot shows a web browser window titled "VGR RTG ext us (Startad från Melior - Edge)". The address bar contains "Vy-AGFA Xero stand alone". The main content area is a search interface with a "Filter" section. The filter section includes the following fields and controls:

- Patient-ID:
- Patientens Namn:
- Födelsedatum:
- Studie- Eller Remisnummer:
- Studiedatum:
- Modalitet:
- Sök:
- Rensa:

At the bottom of the filter section, there are two tabs: "Filtrera patienter" and "Filtrera studier". To the right, there are two dropdown menus: "Listvy" and "Sortera efter".

5. Filtrera på förslagsvis studiedatum (lika med datum då undersökningen länkats till VGR) och modalitet och tryck på sök
6. Utifrån vald filtrering fylls nu arbetslistan med undersökningar som matchar valda sökkriterier
7. Dubbelklicka på önskad undersökning för att öppna upp Xeros bildvisare. Bilder och svar presenteras