

LATHUND – ViewPoint Fostermedicin – Föra över resultat till Millennium

1. I ViewPoint, sök fram ultraljudsundersökningen för att dokumentera kliniskt och sedan föra över resultatet till Millennium
2. Dubbelklicka ultraljudsundersökningen för att öppna den
3. Dokumentera dina kliniska resultat i rapport-fliken (**RUL, Tillväxt / flöde, osv**) (1)
4. Klicka på knappen **Snabbrapporter** för att välja en av regionens standardmallar för dokumentering (2)
5. När du är klar med din kliniska dokumentation, välj undersökningsstatus **Signera, skicka till Millenium** (3)

Viktigt

- Det är inte möjligt att föra över resultatet av undersökningar som är genomförda innan Millennium infördes

The screenshot shows the ViewPoint software interface. On the left, a list of ultrasound examinations is visible, with 'Tillväxt / flöde [35+1]' selected. The main area displays patient data and ultrasound results. Three red boxes with numbers 1, 2, and 3 highlight specific elements:

- 1. A button labeled 'Tillväxt / flöde' in the top right corner.
- 2. A button labeled 'Snabbrapporter' in the top right corner.
- 3. A button labeled 'Signera, skicka till Millennium' in the top right corner.

The main content area shows the following data:

Indikation
Fosterviktskattning

Metod
Undersökningstyp: Transabdominal ultraljudsundersökning
Förhållanden: goda

Typ av graviditet
Antal foster: 2

Datering

Dateringsmetod	Datum	Detaljer	Graviditetslängd	BP
<input type="radio"/> Senaste menstruation	yyyy-MM-...	Cykel	Cykellängd från	d
<input type="radio"/> Annan datering	yyyy-MM-...			yyyy-MM-...
<input type="radio"/> Ultraljud Foster A		baserad på		
<input type="radio"/> Ultraljud Foster B		baserad på		
Beslutad datering		baserat på ultraljud (Foster A: BPD)	22 v + 4 d	2024-03-11

+ Fosterbiometri (A)

BPD	84,8 mm	-/	+49,2%	AD tvär	89,0 mm	33v 2d	
AD ap	87,1 mm		33v 0d	AC	276,9 mm		+59,0%
Abdomen Biometri:							
MAD	88,0 mm	32v 2d	+65,4%	Bålområde, rekt	77,5 cm ²	35v 5d	>+99%

On the right side, there are two graphs showing fetal growth curves. The top graph is 'Biparietal diameter (mm)' and the bottom graph is 'Medel abdominal diameter (mm)'. Both graphs show a blue line representing the patient's data and red lines representing the 5% and 95% percentiles.

Tabell över värden som förs över från ViewPoint till Millennium

Värde	Avsnitt i ViewPoint	Fält i ViewPoint	Kommentar
Antal fosterhinnor	Typ av graviditet	Antal foster	
Chorionicity	Typ av graviditet	<i>Inget namn</i>	Fältet visas endast när man har en flerbördsgraviditet
Beräknad förlossning enligt ultraljud	Datering	Beslutad datering / BP	
Fostervikt	Fosterbiometri	Vikt	Alla värden vid flerbördsgraviditeter förs över
Fostervikt, avvikelse	Fosterbiometri	Vikt	Alla värden vid flerbördsgraviditeter förs över
Fostervattenmängd, DVP	Allmän bedömning	Fostervatten diameter	Alla värden vid flerbördsgraviditeter förs över
Fostervattenmängd, AFI	Allmän bedömning	Fostervatten AFI	
Navelsträngsflöde, BFC	Fetal Doppler	Navelsträngsartär	Alla värden vid flerbördsgraviditeter förs över
Uterina flöde PI, höger	Doppler av modern	PI (höger)	
Uterina flöde PI, vänster	Doppler av modern	PI (vänster)	
Cervix längd	Moderns anatomi	Cervix längd	
Utlåtande	Utlåtande	<i>Inget namn</i>	
Uppföljning	Uppföljning	<i>Inget namn</i>	