
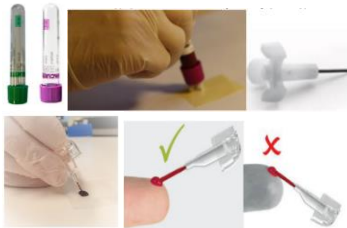


## Snabbguide HbA1c Afinion 2


### Analysera patientprov




1. Skanna VGR-ID (Operatörs-ID) och tryck på 




2. Ta ditt prov venöst eller kapillärt. Fyll kapillären i ett svep. Torka **inte** av kapillären

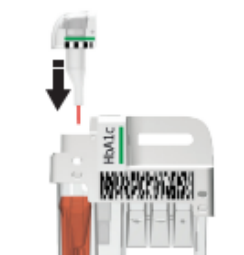


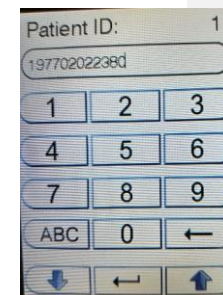
3. Sätt tillbaka kapillärhållaren i testkassetten

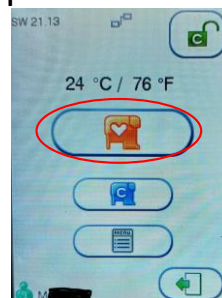


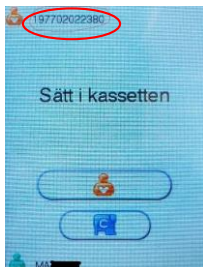
4. Tryck på , luckan öppnas



5. Tryck på orange knappen med hjärta 




6. Skanna personnumret (Patient-ID) 12 siffror och tryck på 




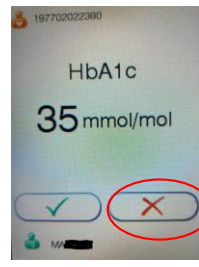
7. Kontrollera personnumret




8. Sätt i testkassetten och tryck lätt på luckan så den stängs. Analysen startar

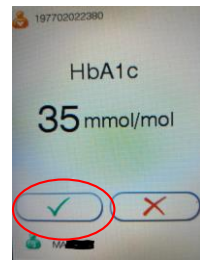


9. Tryck på  för att godkänna analysen




10. Om det blivit något fel på analysen tryck på  Radera och analysera om provet



11. Ta ut testkassetten och släng den

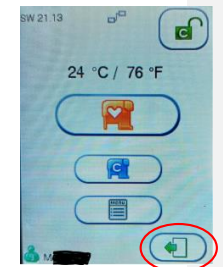


12. **Logga alltid ut** efter att du analyserat klart genom att tryck 

## Snabbguide HbA1c Afinion 2

### Analysera kontroll 2 nivåer 1 gång/vecka




1. Skanna VGR-ID (Operatörs-ID) och tryck på 




2. Börja med att få den rumstempererade **gelliknade kontrolllösningen rinnande** genom att knacka flaskan försiktigt i bordet. Skaka och vänd flaskan 10–15 gånger uppochner kraftigt för att blanda lösningen. Fyll kapillären i ett svep




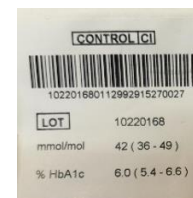
3. Torka **inte** av kapillären Sätt tillbaka kapillärhållaren i testkassetten

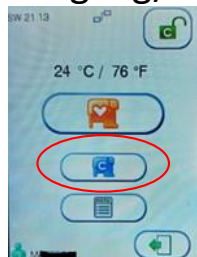


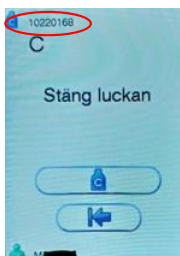
4. Tryck på  luckan öppnas



5. Tryck på blåa knappen med C 




6. Skanna kontrollens lotnummer (Kontroll-ID) som finns i kontrollförpackningen och tryck på 




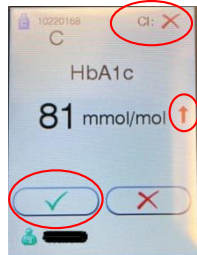
7. Kontrollera lotnumret på kontrollen




8. Sätt i testkassetten och tryck lätt på luckan så den stängs Analysen startar

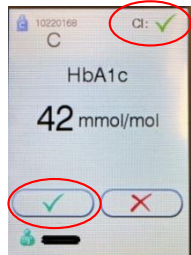


9. **Godkänd** kontroll Tryck på  för att **godkänna** analysen och skicka resultatet till VIS




9. **Underkänd** kontroll Tryck på  och åtgärda ev. fel samt analysera om kontrollen



11. Ta ut testkassetten och släng den

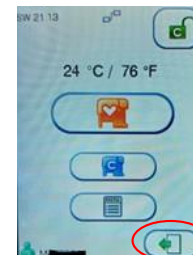

12. **Logga alltid ut** efter att du analyserat klart genom att trycka på 

**Kommenterad [AL1]:** Resultatet skickas till patientjournalen