

# Snabbguide HemoCue Glucose 201 DM RT


## Analysera patientprov



1. Tryck på knappen på/av  
Dra ut kuvetthållaren



2. Ange Användar-ID  
Skanna ditt VGR-ID

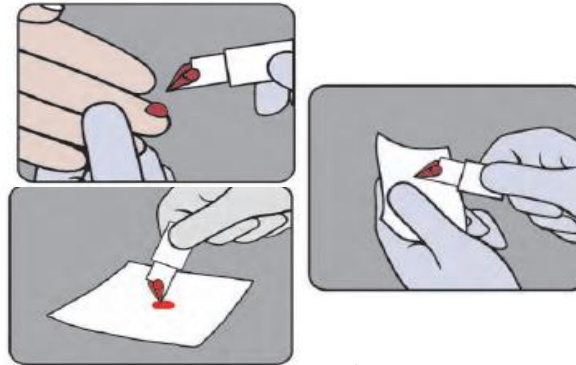

3. Ta ditt prov venöst/kapillärt  
Fyll kuvetten i ett svep  
Torka av överflödigt blod på sidorna av kuvetten  
**Kapillärt prov:** Torka bort 3 bloddroppar  
innan kuvetten fylls.



4. Sätt in kuvetten  
Stäng kuvetthållaren




5. Skanna Patient id:  
ID-etikett (12 tecken)



6. Kontrollera  
Personnummer  
Tryck OK



7. Resultat visas: Tryck OK för  
att godkänna provsvar

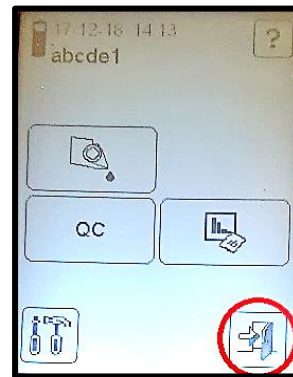

8. Tryck på "dörren" och Logga ut om  
inga fler prover ska **tas**.  
Placera instrumentet i  
dockan/laddningsstationen för  
svarsöverföring till patientjournal

# Snabbguide HemoCue Glucose 201 DM RT


## Analysera kontroll på 2 nivåer 1 gång/veckan




1. Tryck på knappen på/av  
Dra ut kuvetthållaren



2. Ange användar-ID  
Skanna ditt VGR-ID

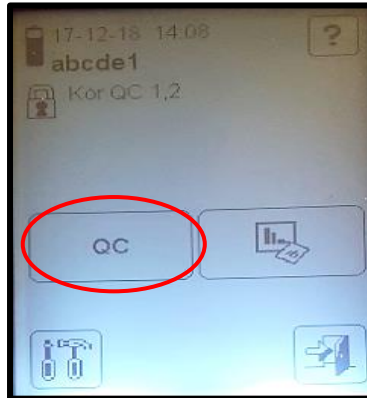

3. Tryck på QC

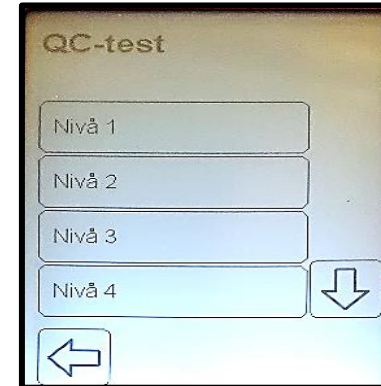

4. Välj den nivån som ska analyseras



5. Blanda flaskan noggrant  
Fyll kuvetten helt i ett svep




6. Torka av överflödig  
kontrollvätska  
på sidorna av kuvetten




7. Lägg kuvetten i  
kuvetthållaren  
Stäng kuvetthållaren



8. Skanna in kontrolloten

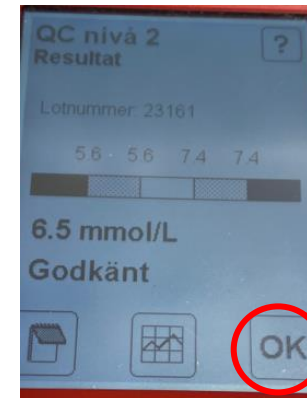

9. Om resultatet är inom intervallet godkänns  
det genom att trycka OK  
Resultat utanför gränserna (Underkänt)  
kompletteras med en åtgärdskommentar.  
Därefter analyserar man kontrollnivån på nytt

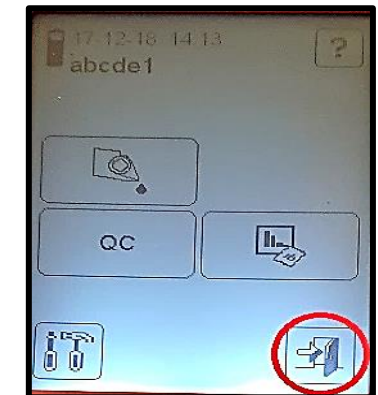

10. Gör om samma procedur för  
nästa nivå instrumentet kräver.  
Tryck sedan på dörrknappen och  
Logga ut om inga fler kontroller ska  
analyseras