

# Snabbguide HemoCue Hb 201 DM


## Analysera patientprov



1. Tryck på knappen på/av  
Dra ut kuvethållaren



2. Ange Användar-ID  
Skanna ditt VGR-ID

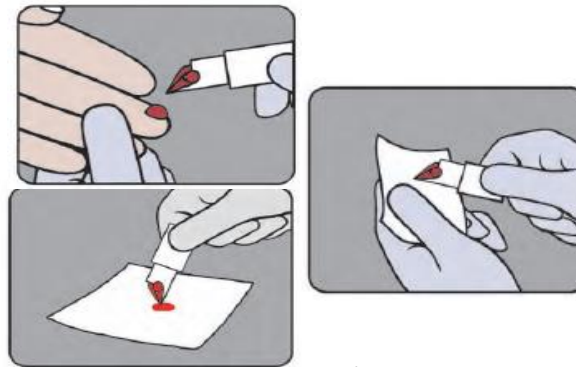


3. Ta ditt prov venöst/kapillärt  
Fyll kuvetten i ett svep  
Torka av överflödigt blod på sidorna av kuvetten  
**Kapillärt prov:** Torka bort 3 bloddroppar  
innan kuvetten fylls. Fyll 2 kuvetter



4. Sätt in kuvetten  
Stäng kuvethållaren



5. Skanna Patient-id:  
ID-etikett (12 tecken)

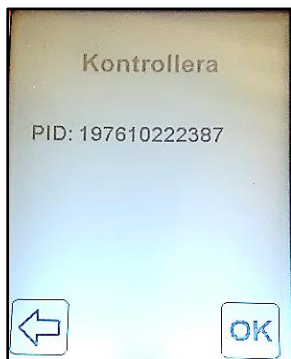


6. Kontrollera  
Personnummer  
Tryck OK




- 7a. **Venöst prov**  
Resultat visas: Tryck OK för att  
godkänna provsvar



- 7b. **Kapillärt prov**  
Resultat visas: Tryck på knappen  
Dubbelkuvett. Sätt in kuvett nr 2

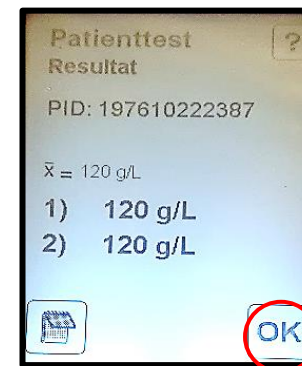

- 7c. **Kapillärt prov**  
Resultat nummer två skickas över  
till patientjournalen. Provsvaren får  
skilja max 8 g/L  
Tryck OK för att godkänna provsvar

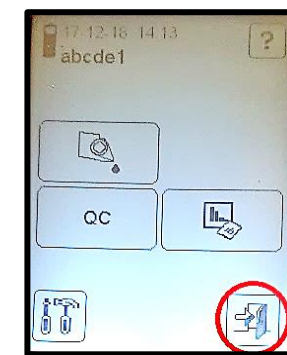

8. Tryck på "dörrknappen" och Logga  
ut om inga fler prover ska tas.  
Placera instrumentet i  
dockan/laddningsstationen för  
svarsöverföring till patientjournal


2024-01-11 Sida 1 (2)

# Snabbguide HemoCue Hb 201 DM


## Analysera kontroll på 2 nivåer 1 gång/vecka




1. Tryck på knappen på/av  
Dra ut kuvetthållaren

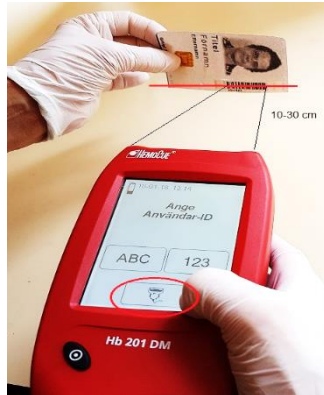

2. Ange användar-ID  
Skanna ditt VGR-ID

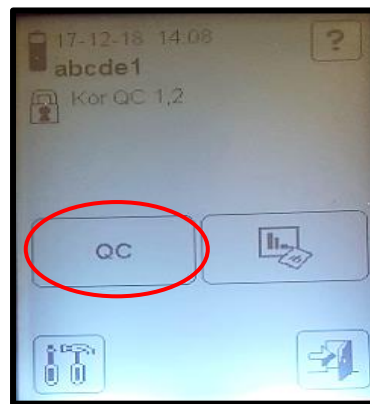

3. Tryck på QC

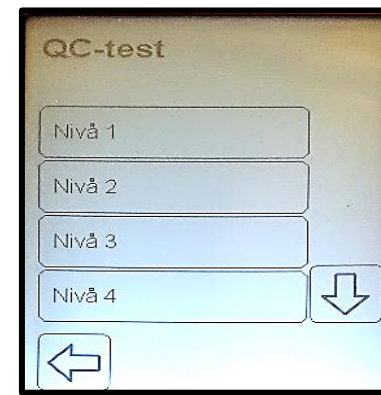

4. Välj den nivå som ska analyseras



5. Blanda flaskan noggrant  
Fyll kuvetten helt i ett svep




6. Torka av överflödig  
kontrollvätska  
på sidorna av kuvetten




7. Lägg kuvetten i  
kuvetthållaren  
Stäng kuvetthållaren



8. Skanna in kontrolloten

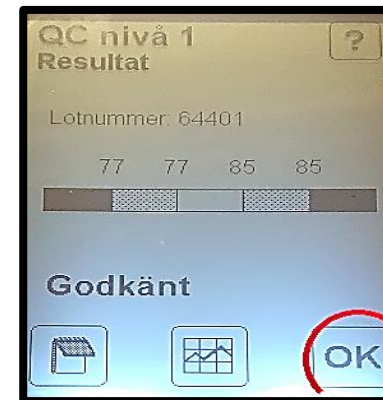

9. Om resultatet är inom intervallet godkänns  
det genom att trycka OK  
Resultat utanför gränserna (Underkänt)  
kompletteras med en åtgärdskommentar.  
Därefter analyserar man kontrollnivån på nytt

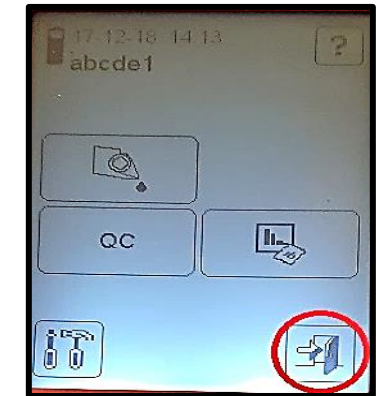

10. Gör om samma procedur för  
nästa nivå instrumentet kräver.  
Tryck sedan på dörrknappen och  
Logga ut om inga fler kontroller ska  
analyseras.