

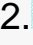





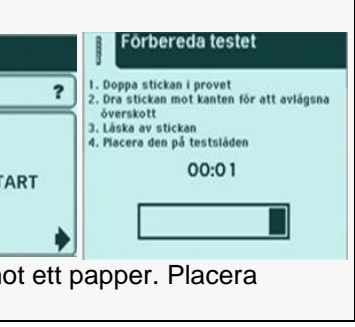




Snabbguide Clinitek Status+

Sticka

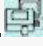
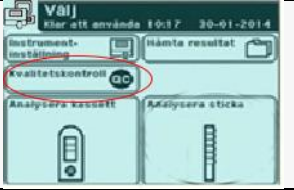
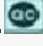
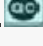
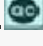
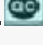
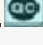
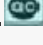
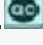

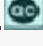
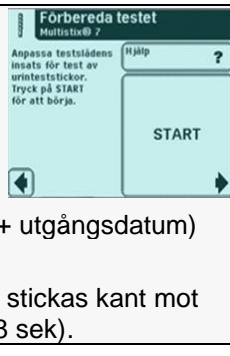

Analys av Patientprov

<p>Överst står:</p> <p>1.  Välj</p>	<p>Tryck på Analysera Sticka</p> <p>(Om den markerade rutan endast är hälften så hög och inte har någon bild så måste kontroller analyseras innan patientprov, se andra sidan.)</p>	
<p>2.  Användar -ID</p>	<p>Skanna VGR-ID. Tryck därefter på OK</p>	
<p>3.  Patientinformation</p>	<p>Tryck på Ange ny patient</p>	
<p>4.  Ange patient-ID</p>	<p>Skanna patient-ID. Tryck därefter på OK</p>	
<p>5.  Förbereda testet</p>	<p>Tryck Start samtidigt som stickan doppas i provet.</p> <p>Dra stickan mot muggen och läska av stickans kant mot ett papper. Placera stickan på släden (inom 8 sek)</p>	
<p>6.  Resultat</p>	<p>Tryck Klart, kasta den avlästa stickan</p>	

Snabbguide Clinitek Status+

Sticka

Analys av Kontrollprov

<p>Överst står: 1.  Välj.</p>	<p>Tryck på Kvalitetskontroll QC</p>	
<p>Överst står: 2.  Kvalitetskontroll Välj typ av test</p>	<p>Tryck på kontroll av sticka (Om det står "obligatorisk" har tiden för kontroll gått ut)</p>	
<p>3.  Användar ID</p>	<p>Skanna VGR-ID Tryck därefter på OK</p>	
<p>4.  Kontroll och nivå</p>	<p>Tryck på Ange lot och utgångsdatum</p>	
<p>5.  Kontrollot</p>	<p>Skanna streckkoden på röret (kontrollprov nr 1 DipStrip1 analyseras före nr 2 DipStrip2) Tryck därefter på OK</p>	
<p>6.  Utgångsdatum för kontroll</p>	<p>Tryck på OK</p>	
<p>7.  Sticklot</p>	<p>Tryck på Ange ny lot och utgångsdatum</p>	
<p>8.  Sticklot</p>	<p>Skanna stickburkens streckkod</p>	
<p>9.  Förbereda testet</p>	<p>Tryck Start samtidigt som stickan doppas i kontrollprovet. (I startrutan står även nummer på kassetlot + utgångsdatum) Dra stickan mot kanten av röret och läska av stickas kant mot ett papper. Placera stickan på släden (inom 8 sek).</p>	
<p>10.  Resultat</p>	<p>Tryck Klart, kasta den avlästa stickan. Börja på punkt 4 när du analyserar den andra kontrollnivån.</p>	