

2026-06-11

LABNYTT

Information från Klinisk Kemi

APTT(OFH) – monitorering av behandling med ofraktionerat heparin

APTT-analysen är tidsberoende hos patienter som behandlas med ofraktionerat heparin. Klinisk

Kemi har sedan 2023 erbjudit analyskoden APTT(OFH) och detta är för att säkerställa korrekt analysresultat.

Analysen APTT(OFH) är avsedd enbart för monitorering av patienter som behandlas med ofraktionerat heparin. Analysmetoden är densamma som för ordinarie APTT, men provet hanteras med en snabbare preanalytisk process, vilket ger ett mer tillförlitligt resultat.

Provet ska analyseras inom en timme efter provtagning. Blodprovet måste därför överlämnas direkt till laboratoriet och får inte transporteras via rörpost.

Koden i melior är: **P-APT-tid (OFH)**

Se labbutbud för ytterligare information

Vid frågor kontakta:

Sara Johansson, Leg Biomedicinsk analytiker

Laboratorium för Klinisk Kemi Alingsås

Tele nr: 0322-226320

Li Bian

Överläkare, Med dr.

Laboratoriet för Klinisk kemi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mail: li.bian@vgregion.se

Kontakt:

Klinisk kemi Borås: 033-6161864

Klinisk kemi och transfusionsmedicin Alingsås: 0322-226320

Klinisk kemi och transfusionsmedicin Skene: 0320-779245



Har du synpunkter på LABNYTT kontakta:
sandra.davidsson@vgregion.se