

Corpuls SÄS



Fack/väska 1 från vänster - Ekg sladd 4 avl. och Saturationsmätare

Fack/väska 2 från vänster - Ekg sladd 6 avl.

Fack/väska 3 från vänster - Blodtrycksmanschett vuxen liten & Barn - Saturationsprob engångs barn

Fack/väska 4 från vänster - Blodtrycksmanschett vuxen stor

Fack/väska Bak:

-Defipadds Vuxen 2st

-Förlängningskabel def.

Kolla utgångsdatum Defipadds

Daglig kontroll och veckokontroll av Corpuls3 SÄS

Starta apparaten

- ☐ Se till att apparat är ihopmonterad som en kompakt enhet.
- ☐ Starta apparat. Internt självtest genomförs, kurvor och parametrar visas.
- ☐ Kontrollera att symbolen för kommunikation mellan moduler visas med ett fyllt streck (mekaniskt anslutna).
- ☐ Kontrollera laddningsstatus på apparaten.

Test av kommunikation mellan moduler och visuelltinspektion

- ☐ Montera isär de tre modulerna. Kontrollera att symbol för kommunikation mellan moduler ändras till en vågform.
- ☐ Koppla ihop de tre modulerna. Kontrollera att symbol för kommunikation återigen blir ett fyllt streck.
- ☐ Kontrollera att apparat, patientkablar, en styck defibrilleringselektrod (vuxen) och en styck defibrilleringselektrod (barn) finns. En extra defibrilleringselektrod vuxen skall finnas i ambulansen. EKG elektroder och rakhyvel finns i läkemedelsväskan. Kontrollera att dessa inte har några visuella skador/felaktigheter.

Skrivare och strömförsörjning

- ☐ Kontrollera att det finns tillräckligt med papper i skrivaren. Skriv förslagsvis ut en skärmdump. Den röda markeringen som indikerar att pappret snart är slut ska inte visas. Extra rulle skrivarpapper ska finnas i bilen.
- ☐ Anslut åter apparaten till strömförsörjning i bilen och kontrollera att lampan för strömförsörjning lyser.

Defibrillator

- ☐ Anslut testboxen till defibrillatoren. Förlängningskabel skall vara ansluten.
- ☐ Genomför en (intern) manuell defibrillering med 200J. Kontrollera att energin laddas ur via test-uttaget och att inga felmeddelanden ges.

Veckokontroll enligt ovan med tillägg av:

Defibrillator och EKG.

- ☐ Daglig kontroll
- ☐ Koppla 4-avl EKG kabel och 6-avl EKG till respektive färgmarkerade platser på testboxen.
- ☐ Gör ett EKG-signaltest genom att välja D-EKG och kontrollera att samtliga avledningar visas på skärmen.
- ☐ Kontrollera utgångsdatum på EKG elektroder och defibrilleringselektroder.