

Ansvarsfördelning i sköljrum för kliniskt träningscentrum (KTC) och forskningsmottagning, byggnad 35

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

Bakgrund och syfte

I byggnad 35 finns ett sköljrum som används av både kliniskt träningscentrum (KTC) och forskningsmottagningen på SÄS. KTC serverar hela sjukhuset med träningsmaterial och instrument som behöver rengöras efter varje träningstillfälle. Forskningsmottagningen använder sköljrummet för hantering och rengöring av kroppsvätskor från patienter som deltar i studier.

Syftet med dokumentet är att beskriva ansvarsfördelningen kring skötsel av sköljrummet samt förhållningssätt för att kunna garantera ordning och att personal inte utsätts för onödiga risker.

Förkortningar, uttryck och definitioner

Förkortning	Definition
Diskdesinfektor	En maskin som används för att rengöra och värmedesinficera

	medicinska instrument, utrustning och andra föremål för att eliminera smittrisker.
HLR	Hjärt- och lungräddning.
KTC	Kliniskt träningscentrum.
MiV	Material i vården, en sjukhusövergripande hantering av förbrukningsmaterial.
Spoldesinfektor	Instrument avsedd för rengöring och desinfektion.

Utförande

Utbildningsenheten har huvudansvaret för sköljrummet och ansvarar för att informera de som nyttjar utrymmet att sköljrummet är att betrakta som ett sköljrum på en vanlig vårdenheter. Detta innebär att var och en gör i ordning efter sig och att material placeras enligt uppmärkning och instruktion.

Underhåll av utrustning görs enligt riktlinje [Disk- och spoldesinfektorer - Loggbok](#).

Inköp av förbrukningsmaterial

Utbildningsenheten ansvarar för att beställa tvättpåsar samt köper in övrigt förbrukningsmaterial som inte ingår i MiV.

Städning

Sköljrummets golv städas regelbundet av Regionservice i enlighet med fastställda rutiner och serviceavtal. Var och en har ansvar att städa övriga ytor efter att ha nyttjat rummet.

Avställningsytor

Den smutsiga ytan är ingen avställningsyta. Eventuellt kan man ställa något där tillfälligt som ska in i diskmaskinen om den är i gång just då, men detta

åtgärdas när diskmaskin är klar. Enligt ovan behövs inte separata ytor för KTC och forskningsmottagningen.

Den rena ytan ska vara ren och det är inte heller någon avställningsyta utan godset ska torkas omgående och ställas tillbaka på sin plats. Här ska inte gods ställas för att självtorka.

Den långa bänken kan användas som avställningsyta för rent gods. Här kan HLR-material som inte är torrt förvaras tills det torkat eller används av nästkommande HLR-utbildning. Anställd på utbildningsenheten går igenom sköljrummet en gång i veckan.

Tvättmaskin och torktumlare

Vid användning av tvättmaskin och torktumlare ansvarar användaren för att respektive maskin återställs efter användning. KTC ansvarar för att köra rengöringsprogram på båda maskinerna en gång per år.

Spoldesinfektor

Forskningsmottagningen använder spoldesinfektorn för kroppsvätskor som kan innehålla cytostatika. Hantering av detta ska ske av personal med erfarenhet av cytostatika. Spoldesinfektorn körs omgående när material ställts in.

Forskningsmottagningen och KTC kör spoldesinfektorn separat.

Underhåll görs enligt [Spoldesinfektor - Checklista för dagligt underhåll](#), lista på väggen i sköljrummet. Underhållet görs en gång per vecka i stället för dagligen då spoldesinfektorn inte används dagligen. Underhåll sköts av KTC.

Diskdesinfektor

Diskdesinfektor startas så snart en övning är avslutad eller när patientarbete är avslutat. Diskdesinfektorn behöver inte vara helt fylld för att startas. Den som startar maskinen sätter upp rätt skylt (KTC alt. Forskningsmottagning) i klämman som sitter på luckan. Detta för att veta vilken typ av gods som rengörs och vem som ansvarar för urplockning. Det rena godset får ej placeras på avställningsytor ”ren sida” utan ska placeras på avsedd förvaringsplats. Behöver godset torka kan den långa bänken användas.

HLR-material som diskas placeras på diskbänksytan ovanför diskmaskin och torktumlare tills godset torkat. Detta kommer att tas omhand löpande av HLR-instruktörer som nyttjar KTC eller personal på KTC.

Underhåll görs enligt [Diskdesinfektor – Checklista för dagligt underhåll](#), lista på väggen i sköljrummet. Underhållet görs en gång per vecka i stället för dagligen då spoldesinfektorn inte används dagligen. Underhåll sköts av KTC.

Laddare för värmekuddar

Forskningsmottagningen kokar sina värmedynor efter varje patientbesök. När dynorna är färdiga placeras de på avsedd förvaringsplats.

Forskningsmottagningen ansvarar för skötsel av tillhörande laddare.

Kylskåp

Forskningsmottagningen har huvudansvaret för skötsel/städning av kylskåpet.

Vid förändringar

Vid eventuella förändringar i ansvarsfördelning ska denna rutin uppdateras, publiceras och berörd personal tränas i ny ansvarsfördelning.

Relaterad information

1. [Disk- och spoldesinfektorer - Loggbok](#)
2. [Spoldesinfektor - Checklista för dagligt underhåll](#)
3. [Diskdesinfektor – Checklista för dagligt underhåll](#)

Arbetsgrupp

Maria Hermansson, utbildningsledare, SÄS

Lisbeth Therning, forskningssjuksköterska, SÄS

Annica Jagersjö, forskningssjuksköterska, SÄS

Emelie Ragnar, forskningssjuksköterska, SÄS

Andrea Sandberg, strateg forskning, SÄS

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Stabsområde ledning

Innehållsansvar: Maria Hermansson, (marsv166),
Utbildningsledare

Granskad av: Stina Isaksson, (stiis2), Enhetschef

Godkänd av: Jessica Stenqvist, (jesst18), Enhetschef

Dokument-ID: SAS9613-640131427-65

Version: 1.0

Giltig från: 2026-03-25

Giltig till: 2028-03-25