

Corpuls3 - daglig kontroll och veckokontroll, SÄS

Förändringar sedan föregående version

- Kontrollera modulerna så att inga skador finns på dessa.
- Kontrollera att inga skador finns på anslutningen mellan förlängningskabel och defibrilleringselektroder
- Tiden för uppladdning till 200J ska inte ta mer än 7 sek. Vid avvikelser från detta ska defibrillatorn felanmälas.

Sammanfattning

Denna rutin beskriver hur kontroll av Corpuls3 ska genomföras.

Genomförande

Starta apparaten

- Se till att apparat är ihopmonterad som en kompakt enhet.
- Starta apparat. Internt självtest genomförs, kurvor och parametrar visas.
- Kontrollera att symbolen för kommunikation mellan moduler visas med ett fyllt streck
- Kontrollera laddningsstatus på apparaten.

Test av kommunikation mellan moduler och visuellinspektion

- Montera isär de tre modulerna. Kontrollera att symbol för kommunikation mellan moduler ändras till en vågform. Kontrollera modulerna så att inga skador finns på dessa.

- Koppla ihop de tre modulerna. Kontrollera att symbol för kommunikation återigen blir ett fyllt streck.
- Kontrollera patientkablar, defibrilleringselektrod (vuxen) och defibrilleringselektrod (barn) finns, En extra defibrilleringselektrod vuxen skall finnas. EKG elektroder och rakhyvel finns i läkemedelsväskan. Kontrollera att dessa inte har några visuella skador/felaktigheter.

Skrivare och strömförsörjning

- Kontrollera att det finns tillräckligt med papper i skrivaren. Skriv förslagsvis ut en skärmdump. Den röda markeringen som indikerar att pappret snart är slut ska inte visas. Extra rulle skrivarpapper ska finnas med.
- Anslut åter apparaten till strömförsörjning i bilen och kontrollera att lampan för strömförsörjning lyser.

Defibrillator

- Anslut testboxen till defibrillatorn. Förlängningskabel skall vara ansluten. Kontrollera att inga skador finns på anslutningen mellan förlängningskabel och defibrilleringselektroder.
- Genomför en (intern) manuell defibrillering med 200J. Kontrollera att energin laddas ur via testuttaget och att inga felmeddelanden ges. Tiden för uppladdning till 200J ska inte ta mer än 7 sek. Vid avvikelse från detta ska defibrillatorn felanmälas.

Veckokontroll enligt ovan med tillägg av:

Defibrillator och EKG

- Daglig kontroll
- Koppla 4-avl EKG kabel och 6-avl EKG till respektive färgmarkerade platser på testboxen.
- Gör ett EKG-signaltest genom att välja D-EKG och kontrollera att samtliga avledningar visas på skärmen.
- Kontrollera utgångsdatum på EKG elektroder och defibrilleringselektroder.

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Tommy Tikka, IT- och teknikansvarig ambulanssjukvården, VO akutsjukvård SÄS

Fastställt av

Magnus Guldenpfennig, verksamhetschef, VO akutsjukvård SÄS

Nyckelord

Corpuls3, moduler, apparaten, defibrillator, EKG

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Akutklinik

Innehållsansvar: Tommy Tikka, (tomti),
Ambulanssjuksköterska

Godkänd av: Magnus Guldenpfennig, (maggu2),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9629-34067525-19

Version: 4.0

Giltig från: 2025-06-12

Giltig till: 2027-06-11