

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Rutin

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Jenny Ulveström, (jenhe2), Fysioterapeut

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Malin Camper, (malgu5), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-02-05

Giltig till: 2028-02-05

Andningshjälpmedel – rengöring

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Genomförande	3
Manometer	3
T-konnektor.....	3
Slang (bubblslang).....	3
PEP-pip.....	3
Motstånd till PEP-pip/mask	3
PEP-mask	4
Rengöring vid långtidsbruk hos enskild patient.....	5
Trakeostomiadapter	5
Dokumentinformation.....	6

Sammanfattning

Detta dokument beskriver hur andningshjälpmedel ska rengöras.

Genomförande

Manometer

Art.nr 102711926

Manometern torkas av med ytdesinfektionsmedel efter användning.

T-konnektor

Art.nr 102711983

T-konnektor med slang är en engångsprodukt och ska bara användas till en patient. Slängs efter användning.

Slang (bubbelslang)

Art.nr 200012668

Används med t-konnektor för utprovning av motstånd vid andningsträning. Slangen är engångsmaterial och slängs efter användning.

PEP-pip

Art.nr 109783852

För enpatientsbruk.

Motstånd till PEP-pip/mask

Motstånd 1,5 mm (svart) art.nr 200012820

Motstånd 2,0 mm (vit) art.nr 106039654

Motstånd 2,5 mm (gul) art.nr 106039639

Motstånd 3,0 mm (blå) art.nr 105974497

Motstånd 3,5 mm (grön) art.nr 105899033

Motstånd 4,0 mm (orange) art.nr 106039621

Motstånd 4,5 mm (röd) art.nr 200012819

Motstånd 5,0 mm (brun) art.nr 200012826

Motstånd 6,0 mm (lila) art.nr 200012825

För enpatientsbruk.

Set med åtta motstånd (1,5 mm till 6 mm) art.nr 102711850

För flergångsbruk, även mellan patienter.

- PEP-pipen är personbunden.
- Kan användas upp till en vecka, slängs därefter. Skriv datum på PEP-pipen.
- Vid mycket fukt eller annan förorening ska PEP-pipen bytas ut.
- Motstånden är för enpatientsbruk och slängs efter användning. Undantag är de motstånd som levereras i set om åtta och som är märkta Pep/Rmt. Dessa kan rengöras i diskdesinfektor och då återanvändas.

PEP-mask

PEP-set (komplett set med mask, ventil och motstånd) stl 5, stor
art.nr 102711975

PEP-set (komplett set med mask, ventil, motstånd) stl 4, medium
art.nr 102711967

PEP-mask vuxen stl 5 art.nr 102711975

PEP-mask vuxen stl 4 art.nr 102711942

PEP-mask ungdom art.nr 105966170

PEP-ventil (Y-stycke) art.nr 102711991

Rengöring vid långtidsbruk hos enskild patient

- Masken torkas av med rengöringsmedel och vatten 1 gång/dygn.
- Minst 1 gång/vecka eller vid behov rengörs alla delar isärplockade (mask, ventil, motstånd) i diskdesinfektor.
- Låt alla delar torka innan de sätts ihop igen.

Mellan varje patient

Plocka isär alla delar och rengör i diskdesinfektor.

Trakeostomiadapter

Art.nr 103565263

- Adaptern rengörs i diskdesinfektor, isärplockad från PEP-ventil (Y-stycke).
- Rengörs minst 1 gång/vecka eller vid behov vid långtidsbruk hos enskild patient.
- Rengörs i diskdesinfektor mellan varje patient.

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Jenny Ulveström, leg fysioterapeut, Arbets- och
fysioterapimottagning, SÄS Borås

Fastställt av

Malin Camper, verksamhetschef, Neuro- och rehabiliteringsklinik,
SÄS

Nyckelord

Fysioterapi, fysioterapeut, sjukgymnastik, sjukgymnast, andning,
andningshjälpmedel, hjälpmedel, rengöring

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Jenny Ulveström, (jenhe2), Fysioterapeut

Granskad av: Marie-Louise Hilding, (marst81),
Specialistfysioterapeut, Jenny Ulveström, (jenhe2), Fysioterapeut

Godkänd av: Malin Camper, (malgu5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9630-14576379-67

Version: 4.0

Giltig från: 2026-02-05

Giltig till: 2028-02-05