

# Disk- och spoldesinfektorer - Loggbok

## Sammanfattning

Inom sjukvård används disk- och spoldesinfektorer för rengöring och värmedesinfektion av sjukvårdsmaterial. För att säkerställa apparaturens funktion ska underhåll och funktionskontroller utföras och dokumenteras. I riktlinjen tydliggörs ansvarsfördelningen gällande dokumentation i desinfektionsapparaturens loggbok.

## Förändringar sedan föregående version

Giltighetstiden förlängd.

## Innehållsförteckning

Sammanfattning .....	1
Förändringar sedan föregående version.....	1
Bakgrund.....	2
Syfte .....	2
Förutsättningar .....	2
Ansvar .....	2
Vårdgivarens (SÄS) ansvar .....	2
Verksamhetschefens ansvar .....	2
Vårdenhetschefens ansvar .....	2
Personalens ansvar .....	3
Vårdhygiens ansvar.....	3
Servicegivarens ansvar.....	3
Genomförande .....	3
Dokumentinformation.....	4
Referensförteckning.....	4

## Bilagor

[Diskdesinfektor - Checklista för dagligt underhåll](#)

[Spoldesinfektor - Checklista för dagligt underhåll](#)

[Blankett, Disk-/spoldesinfektor - Felanmälan](#)

## Bakgrund

Maskinell rengöring och desinfektion bör vara förstahandsvalet för rengöring av sjukvårdsmaterial enligt rekommendationer beskrivna i den tekniska rapporten SIS-TR 46:2014. Inom svensk sjukvård används spol- och diskdesinfektorer för detta ändamål. För att säkerställa apparaturens funktion ska underhåll och funktionskontroller utföras och dokumenteras enligt standard SS-EN ISO 15883. Personal som handhar och kontrollerar apparaturen ska ha adekvat utbildning för att kunna genomföra uppgiften.

## Syfte

Att tydliggöra ansvarsfördelningen för loggboksdokumentation för disk- och spoldesinfektorer.

## Förutsättningar

### Ansvar

#### Vårdgivarens (SÄS) ansvar

- Att skapa förutsättningar för en kvalitetssäkrad instrumenthantering.
- Att utrustningen underhålls regelbundet.

#### Verksamhetschefens ansvar

- Att desinfektionsapparaturen blir funktionskontrollerad regelbundet.
- Att personal blir utbildad i handhavandet av apparaturen. Särskilt viktig är utbildning och information om nyanskaffad utrustning.
- Att kontinuerligt tillse att berörd personal har den kompetens som krävs.

#### Vårdenhetschefens ansvar

- Att den personal som handhar disk- eller spoldesinfektorer har genomgått såväl teoretisk som praktisk utbildning.
- Att det finns en loggbok till varje disk- och spoldesinfektor.

### Personalens ansvar

- Att dagligen utföra och dokumentera nödvändiga kontroller enligt loggboken.

### Vårdhygiens ansvar

- Att tillhandahålla material till loggbok.

### Servicegivarens ansvar

- Att dokumentera underhåll, kontroller och eventuella reparationer i loggboken.
- Att följa aktuella serviceavtal.

## Genomförande

Loggbok ska finnas till varje disk- och spoldesinfektor. Enligt standarden SS EN ISO 15883 finns krav på att dokumentera följande:

- Valideringsdokumentation till diskdesinfektorer, utfärdad av leverantör.
- Installationsdokument till spoldesinfektorer.
- Instruktionsbok/bruksanvisning.
- Årligt förebyggande underhåll (FU) och upprepad processkontroll (UPQ) av diskdesinfektor av godkänd tekniker.
- Årligt förebyggande underhåll (FU) av spoldesinfektor av godkänd tekniker.
- Checklista för dagligt underhåll.
- Felanmälningar och reparationer.
- Namn och telefonnummer till ansvariga för underhåll.

## Dokumentinformation

### För innehållet svarar

Maria Nelson, hygiensjuksköterska, vårdhygien, SÄS

### Remissinstanser

Magnus Edman, tekniker, Västfastigheter

### Fastställt av

Jerker Nilson, chefläkare, SÄS

### Nyckelord

instrumenthantering, loggbok, diskdesinfektorer, spoldesinfektorer, autoklav, autoklavering

## Referensförteckning

1. SIS TR 46:2014, Processer för rengöring, desinfektion och sterilisering - Validering och rutinkontroll inom svensk vård och omsorg.
2. SS-EN ISO 15883-1:2009 Disk- och spoldesinfektorer - Del 1: Allmänna krav, definitioner och provningsmetoder.
3. Desinfektionsapparat. Vårdhandboken.se  
[www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/desinfektion-och-sterilisering/desinfektionsapparat/oversikt/](http://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/desinfektion-och-sterilisering/desinfektionsapparat/oversikt/)
4. SODA (spol- och diskdesinfektor arbetsgruppen). Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion - Spol- och diskdesinfektorer. Svensk Förening för Vårdhygien; 2024.  
<https://sfvh.se/Utbildning-disk-spoldesinfektorer>

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Riktlinje

**Gäller för:** Södra Älvsborgs Sjukhus

**Innehållsansvar:** Maria Nelson, (marhe116),  
Hygiensjuksköterska

**Godkänd av:** Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

**Dokument-ID:** SAS9642-738863596-75

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2025-01-14

**Giltig till:** 2027-01-14