

Borås Koncentratförsörjning

Förändringar sedan föregående version

Uppdaterat Byte av koncentrat tank, efter byte av koncentratkopplingar.

Sammanfattning

GMP - Borås Koncentratförsörjning

Utskriven kopia finns i rutinpärm och i koncentratrum.

Utförande

CDS 03

Systemet består av två distributionsslingor CDS1 och CDS2.

Startar och stoppar med hjälp av tidkanaler.

Smartbag 311,25 används på båda distributionsslingorna. Då maskinerna är anslutna till båda slingorna och maskinen har en av slingorna som förval kommer det CDS intag som inte används ha stillastående koncentrat i ventilsystemet. Detta har visat sig kristalliseras och blockera intaget för koncentrat. Detta kontrolleras vid värmedesinfektion och maskinen larmar.

För att undvika kristallisering växlar tekniker förval på alla maskiner en gång per två månader. Växlingen dokumenteras på loggblad med datum och växling från CDS x till CDS y detta för att ha spårbarhet.

Om koncentrat i en tank tar slut under behandling
Gul lampa lyser på fjärrkontrollen och röd lampa för tanken som är tom.

CDS 03 byter automatiskt till den fyllda koncentrattanken.

Meddela tekniker så byter han tank.

Om koncentratet tar slut i båda tankarna under behandling

Tysta ljudlarmet på CDS 03.

Skifta koncentrat på de maskiner som använder detta koncentrat.

(CDS1 till CDS2 eller CDS2 till CDS1)

Eller skifta till koncentrat i 4,7 liters förpackning. Finns på hylla i koncentratrummet.

Smartbag

A-koncentrat 311,25

Koncentratet finns i 300 liters förpackningar och 4,7 liters förpackning.

I centralkoncentratanläggningen används 300 liters förpackningar.

För enstaka behandlingar används 4,7 liters förpackning.

På dialysavdelningen används en ny 4,7 liters förpackning till varje patient.

Öppnad förpackning som endast används i teknikerrum av tekniker, max en månads hållbarhet.

Bibag

Bikarbonat

På dialysavdelningen används en ny Bibag till varje patient.

Öppnad förpackning som endast används i teknikerrum av tekniker, max en dags hållbarhet.

Byte av koncentrattank

Byte av koncentrattank utförs normalt av tekniker under dagen. Om tekniker inte är tillgänglig kan koncentrattanken bytas av dialyspersonalen.

Byte av koncentrattank kan ske när en tank indikerar rött (tom tank).

Identifiera vilken tank som är tom och skall bytas. Bytet kan ske under drift.

- Lossa kopplingen med slangen från tanken och dra bort den.
- Våttorka golvytan där koncentrattanken har stått.
- Dra ut den tomma tanken, kör fram den yttre tanken (den som är i drift) mot väggen.
- Våttorka golvytan där koncentrattanken har stått.
- Kör fram en ny tank, kontrollera att koncentrattanken innehåller rätt koncentrat.
- Kontrollera att koncentrattankens anslutning är plomberad och oskadad. Notera på loggblad och signera. Om tanken är på något sätt skadad skall den reklameras till leverantören.
- Riv loss plomberingen.
- Om det behövs, använd RO-vatten och sprit till rengöring och desinfektion.
- Anslut kopplingen med slang till koncentrattanken. Jämför med kopplingen på den andra tanken.
- Kontrollera att slangen inte ligger i kläm.
- När koncentrattanken är utbytt och ansluten. Måste meddelandet som visas på displayen på CDS 03 kvitteras med OK-knappen. Skriv upp datum och tid för tankväxlingen på loggbladet.
- För avluftning av den nya tanken gå till meny tankomkoppling markera den tomma tanken som bytt bekräfta, därefter står det påbörja avluftning. Nästa gång CDS 03 stängs av startar avluftningen.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Rengöring utöver den vanliga veckostädningen

Under tankbytet skall golvet våttorkas. Titta över kabelkanaler, filter samt CDS 03, om det behövs torka av. Spola avloppet och brunnen rent från koncentrat.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Urban Tapper, (urbta), Medicinteknisk
ingenjör

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare, Maria Teresa
"Maite" Gil Gonzalez, (margi18), Överläkare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9660-1081940308-41

Version: 2.0

Giltig från: 2026-03-30

Giltig till: 2028-03-30