

Borås Rutiner vid vattenlarm och fel på vattenanläggning

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument

Ersätter rutin ”3.2.5 Borås Rutiner vid vattenlarm och fel på vattenanläggning” i tidigare ersättningssystem

Sammanfattning

GMP - Borås Rutiner vid vattenlarm och fel på vattenanläggning

Utskriven kopia finns i rutinpärm.

Utförande

Vid larm:

Om båda vattenanläggningarna larmar: **två** röda lampor på driftpanelen ingen grön

➔ koppla om till nöddrift enligt Bilaga C Nöddrift.

Om detta inte fungerar

➔ koppla om till sterilfilter enligt Bilaga D Sterilfilter. Medicinskt ansvarig för tillverkning måste först godkänna användandet av sterilfilter.

OBS: Man skall inte köra med sterilfilter om inte förbehandlingen fungerar.

I båda fallen kör endast HD behandlingar.

Meddela medicinskt ansvarig för tillverkning och sakkunnig person.

Om en vattenanläggning larmar: **en** grön och **en** röd lampa går det att köra dialys (HDF).

Meddela tekniker för felsökning.

Inget inkommande vatten:

Om tryckmätarna på inkommande vatten står på noll.

- ➔ Starta reservvatten enligt anvisning ovanför tryckförhöjningspump i vattenrummet. 3.5.12 Start av reservvatten

Glöm inte stänga av reservvattnet, när det kommunala vattnet är tillbaka.

Dokumentera i loggbok allt som görs.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Urban Tapper, (urbta), Medicinteknisk
ingenjör

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare, Maria Teresa
"Maite" Gil Gonzalez, (margi18), Överläkare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9660-1081940308-48

Version: 1.0

Giltig från: 2025-04-14

Giltig till: 2027-04-14