

Borås Checklista vattenrening morgon

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument

Ersätter rutin ” 3.3.5 Borås Checklista Morgon Kväll” i tidigare kvalitetssystem

Sammanfattning

GMP - Borås Checklista vattenrening morgon

Utskriven kopia finns i rutinpärm och i vattenrummet.

Utförande

Instruktion till checklista, morgon

Bilaga A Checklista vattenrening morgon. Bilaga till rutin 3.3.5 Sitter i pärm i vattenrum.

Vattenanläggningarna RO1 och RO2 och Centralkoncentrat-anläggningen startar och stoppar automatiskt enligt tidkanaler i respektive anläggning.

1. Tryckdifferens mellan partikelfilter. Kontrollera att tryckfallet över manometer M1 och M2 respektive M3 och M4 inte överstiger 0,5 bar, att utgående tryck, manometer M2 och M4 inte understiger 3bar. Notera på checklista.
2. Tidur kolfilter. Kontrollera att klockan visar rätt tid. Signera på checklista.

3. Saltnivå. Kontrollera att saltnivån är över min. strecket. Signera på checklista.
4. Påfyllning av salt. Fyll på salt upp till max. strecket. Var rädd om ryggen, det skall vara minst två som lyfter säckarna vid påfyllning. Notera antalet säckar på checklista.
5. Kontrollera Testomaterna så det inte finns larm röd LED-lampa på panelerna. Om det är larm på klortestomaten kontrollera med teststicka för klor. Se instruktion ovan hyllan med teststickor. Om stickan visar på klor $>0,1$ ppm klor skall inte dialys utföras. Kontakta jourhavande njurläkare och medicinsk tekniks beredskap för åtgärder. Om det är larm på hårdhetstestomaten behövs ingen åtgärd omgående, säg till tekniker så fort han är i tjänst om det händer en helgdag.
6. Konduktivitet. Kontrollera konduktiviteten på displayen på den RO som är i drift. Skall vara $0\mu\text{s} - 10\mu\text{s}$. Notera på checklista.
7. Vid avvikelser meddela tekniker.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Urban Tapper, (urbta), Medicinteknisk ingenjör

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9660-1081940308-55

Version: 3.0

Giltig från: 2025-05-08

Giltig till: 2027-05-08