

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Jan-Olof Björn, (jaobj1), Medicintekniker

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-31

Giltig till: 2027-03-31

# Blodläckage under behandling

## Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

Ersätter rutin ”3.5.18 Blodläck” i tidigare kvalitetsdokument

## Sammanfattning

GMP - Blodläckage under behandling

Utskriven kopia finns i rutinpärm.

## Utförande

Vid konstaterat blodläckage (visuellt eller med sticka) är det möjligt att ge tillbaka blodet. Sätt då dialysatet i By-pass och ge tillbaka med Koksalt oavsett behandlingsalternativ.

För att sätta Dialysatet i bypass gör på följande sätt:

Gå in på dialysatmenyn och tryck på flöde på/av, eller öppna shuntluckan.

Efter behandlingen är avslutad skall 2 värmeprogram köras på maskinen.

Därefter kan maskinen användas igen, vid synligt blod som kräver demontering av komponenter skall maskinen ut till Tekniker.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Medicinklinik

**Innehållsansvar:** Jan-Olof Björn, (jaobj1), Medicintekniker

**Granskad av:** Anna Bäck, (annba60), Apotekare

**Godkänd av:** Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SAS9660-1081940308-59

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2025-03-31

**Giltig till:** 2027-03-31