

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Jan-Olof Björn, (jaobj1), Medicintekniker

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-05-26

Giltig till: 2027-05-26

# Skene Start av reservvatten

## Förändringar sedan föregående version

Rubrik saknades.

## Sammanfattning

GMP - Skene Start av reservvatten.

Utskriven kopia finns i rutinpärm och i vattenrummet.

Ersätter rutin "3.5.12 Skene Start av reservvatten" i tidigare kvalitetssystem

## Utförande

### Start av reservvatten

När inget inkommande vatten finns. Båda tryckmätarna står på noll.



OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Starta reservvattnet genom att vrida det svarta kranhandtaget A30 ett kvarts varv moturs.



**Kommunalt vatten**

**Reservvatten**

Vänta på tryck (titta på tryckmätarna) CWP´n startar automatiskt när trycket återkommer. För mer information läs kvalitetsdokument:  
*Rutiner vid vattenlarm och fel på vattenanläggning.*

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Medicinklinik

**Innehållsansvar:** Jan-Olof Björn, (jaobj1), Medicintekniker

**Granskad av:** Anna Bäck, (annba60), Apotekare

**Godkänd av:** Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SAS9660-1081940308-61

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2025-05-26

**Giltig till:** 2027-05-26