

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Ingela Cruce, (ingku), Sektionsledare

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-01

Giltig till: 2027-04-01

# Allmänt - Instruktion Kontroll av alla syrgas och suguttag på dialyspelare

## Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument

Ersätter rutin ” 4.06.2 Instruktion Kontroll av alla syrgas och suguttag på dialyspelare” i tidigare kvalitetssystem.

## Sammanfattning

GMP - Instruktion Kontroll av alla syrgas och suguttag på dialyspelare

Utskriven kopia finns i rutinpärm, i rum 2 och 6 (Borås) samt i patientrum 2, 3, 4 och 5 (Skene).

## Utförande

Varje vecka kontrolleras syrgas- och suguttag på dialyspelarna.

Syrgasmanometern skall vridas upp till maxflöde och nivåkulan skall visa aktuellt flöde och inte dala.

Sugaggregatet ska testas så att manometern går till – 400 mmHg.

Dialyspelarnas avlopp rengörs med rengöringsmedel och borste. CDS kopplingarna spolas med RO-vatten i sprayflaska.

Åtgärderna signeras nedan.

**Detta protokoll avser rum nummer:** \_\_\_\_\_

V1		V14		V27		V40	
V2		V15		V28		V41	
V3		V16		V29		V42	
V4		V17		V30		V43	
V5		V18		V31		V44	
V6		V19		V32		V45	
V7		V20		V33		V46	
V8		V21		V34		V47	
V9		V22		V35		V48	
V10		V23		V36		V49	
V11		V24		V37		V50	
V12		V25		V38		V51	
V13		V26		V39		V52	

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Medicinklinik

**Innehållsansvar:** Ingela Cruce, (ingku), Sektionsledare

**Granskad av:** Anna Bäck, (annba60), Apotekare

**Godkänd av:** Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SAS9660-1081940308-80

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2025-04-01

**Giltig till:** 2027-04-01