

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Urban Tapper, (urbta), Medicinteknisk ingenjör

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-14

Giltig till: 2027-04-14

FU_CDS 03 Borås

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

Ersätter rutin ”3.5.11 FU_CDS 03 Borås” i tidigare kvalitetssystem.

Sammanfattning

GMP - FU_CDS 03 Borås.

Utskriven kopia finns i rutinpärm.

Utförande

- Skydda kontakter mm. för spill.
- Klampa in och ut slangar.
- Byt filter rengör kopplingar med RO-vatten.
- Öka tömningstiden från 2 min till 6 min.
- Öka avluftningstiden från 10 sek. till 3 min.
- Klampa utgående slang efter serviceuttag, anslut evakuerings slang till serviceuttaget.
- Kör fyllnadsprogram, avlufta filtren.
- Ta bort evakueringslangen och klamp.
- Återställ tider.
- Starta drift.
- Gör rent och skriv i loggbok.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Urban Tapper, (urbta), Medicinteknisk
ingenjör

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9660-1081940308-83

Version: 1.0

Giltig från: 2025-04-14

Giltig till: 2027-04-14