

Gäller för: Medicinklinik

Giltig från: 2024-11-11

Innehållsansvar: Maria Teresa "Maite" Gil Gonzalez, (margi18), Överläkare

Giltig till: 2026-11-11

Granskad av: Maria Teresa "Maite" Gil Gonzalez, (margi18), Överläkare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

PD-kateter – spolning av vilande PD-kateter

Syfte

Rutin gällande spolning av vilande PD-kateter för att säkerställa flöde. som beskriver syftet med rutinen.

Förutsättningar

Spolning av vilande kateter ska enbart göras om det är blod eller kristaller i slangen. Spolning i onödan innebär teoretisk ökad risk för infektion.

Spolning av vilande kateter utförs efter bedömning av PD-sköterska och i samband med att patienten kommer på besök på PD-mottagningen.

Genomförande

Spolning ska göras under sterila förhållanden, duka upp sterilt. Använd sterila handskar samt dra upp NaCl 9 mg/ml sterilt.

Före spolning ska kateteradaptern desinfekteras med 70 % sprit i 2 minuter.

OBS! Använd aldrig Klorhexidinsprit eftersom detta är toxiskt för bukhinnan.

Spola katetern med 20 ml NaCl 9 mg/ml.

Efter spolning korkas slangen med nytt adapterskydd.

Kom ihåg att man aldrig får aspirera i en PD-kateter eftersom detta kan skada bukhinnan.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Maria Teresa "Maite" Gil Gonzalez, (margi18),
Överläkare

Granskad av: Maria Teresa "Maite" Gil Gonzalez, (margi18),
Överläkare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9660-1154164603-39

Version: 5.0

Giltig från: 2024-11-11

Giltig till: 2026-11-11