

Gäller för: Neuro- och rehabiliteringsklinik
Innehållsansvar: Anna Brännström, (annbr), Enhetschef
Granskad av: Rebecka Molid, (rebal1), Ortopedingenjör
Godkänd av: Malin Camper, (malgu5), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-02-27

Giltig till: 2028-02-27

Arbetsmiljö, ortopedteknik - Rengöring av patientnära verktyg

Sammanfattning

För att säkerställa att patientnära verktyg och utrustning genomgår högrengöring i syfte att förhindra smittspridning.

Förutsättningar

För att säkerställa att patienterna ges en säker vård bör patientnära verktyg och utrustning högrengöras veckovis.

På Rehabiliteringsmedicinskavdelning finns möjlighet att låna högrengöringsmaskin.

Omfattar:

Samtliga verktyg som används i patientnära arbete, ex. saxar, gipstänger och pincetter.

Genomförande

Varje onsdag morgon samlas instrumenten in och bärs upp till Rehabiliteringsmedicinsk avdelning för högrengöring. Maskinen ska köras på program P3 vilket tar ca 1 timma, sedan kan verktygen hämtas igen.

Verktygen i avgjutningsrummen och provrum samlas in av ansvarig personal. Övriga verktyg läggs av medarbetaren i avsett kärl märkt ”smutsigt”.

Verktygen hämtas av medarbetaren i avsett kärl märkt ”rent”. Ansvarig personal placerar tillbaka verktyg i avgjutningsrum och provrum.

Om ordinarie ansvarig inte är närvarande ligger ansvaret på de medarbetare som har ”köksveckan”.

Kraftig nedsmutsade verktyg

Kraftigt nedsmutsade verktyg som använts i patientnära arbete högrengörs samma dag av medarbetaren som handlagt patientfallet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Neuro- och rehabiliteringsklinik

Innehållsansvar: Anna Brännström, (annbr), Enhetschef

Granskad av: Rebecka Molid, (rebal1), Ortopedingenjör

Godkänd av: Malin Camper, (malgu5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9661-671614304-22

Version: 5.0

Giltig från: 2026-02-27

Giltig till: 2028-02-27