

Gäller för: Neuro- och rehabiliteringsklinik

Giltig från: 2025-09-15

Innehållsansvar: Johanna Nyberg, (johpe46), Ortopedtekniker

Giltig till: 2027-09-15

Granskad av: Karl-Johan Westberg, (kajwe4), Ortopedingenjör

Godkänd av: Malin Camper, (malgu5), Verksamhetschef

Gipsfyllning - ortopedteknik

Sammanfattning

Rutinen beskriver tillvägagångssättet vid gipsfyllningen på ortopedteknik. Syftet är att få en jämn kvalitet på gipsarna som ska modelleras.

Genomförande

Förarbete

Gipsnegativ: kragning

Om gipsnegativen ska kragas ritas vid behov en pil på gipsnegativet och en siffra anger hur många cm det ska förlängas.

Om gipsnegativ har modellerats, pensla dessa ytor med vaselin innan fyllning.

Såpa

Såpa gipsnegativen med såpvatten. Såpvattenblandning 1:10. Låt inte såpan torka i gipsnegativet. Blanda ny såpa om det finns mycket gipspartiklar i såpan.

Järn anpassas

Måtta ut armeringsjärn som ska passa i gipsnegativen. Skränk vid behov. Järnet ska sticka upp cirka 20 cm. För långa eller för korta järn gör produktionen svår. Vid behov borra hål i järnet för att kunna hänga upp gipsarna.

Fyllning

Det som ligger i hyllan kl 9:30 kommer att fyllas den dagen. Om fyllning inte hinns med ska ansvarig fyllare prata med handläggare. Vid

bråttomfyllning får handläggare fråga ansvarig fyllare om de hinner att fylla.

Gipsblandning: Blandförhållande 1:1,2

Väg upp kallt vatten på vågen. Nollställ vågen. Sätt på utsuget. Blanda i gipsen, använd silen för att undvika gipsklumpar. När all gips sugits upp i vattnet. Blanda försiktig så att inga klumpar bildas.

Fyll utan luftbubblor

Knacka försiktigt på gipsarna efter fyllning för att få luftbubblor att stiga till ytan. Var försiktig så att inte armeringsjärnet ändrar position. Skaka inläggsgipsarna så de blir plana i botten.

Städa och torka av ytor och verktyg.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Neuro- och rehabiliteringsklinik

Innehållsansvar: Johanna Nyberg, (johpe46), Ortopedtekniker

Granskad av: Karl-Johan Westberg, (kajwe4), Ortopedingenjör

Godkänd av: Malin Camper, (malgu5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9661-671614304-31

Version: 7.0

Giltig från: 2025-09-15

Giltig till: 2027-09-15