

Gäller för: Neuro- och rehabiliteringsklinik
Innehållsansvar: Elin Sahlmark, (elisa33), Ortopedingenjör
Granskad av: Rebecka Molid, (rebal1), Ortopedingenjör
Godkänd av: Malin Camper, (malgu5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-11-10

Giltig till: 2027-11-10

Stomiring till korsett - Ortopedteknik

Sammanfattning

Hur man sätter i en stomiring i en tygkorsett.

Förutsättningar

Att man på korsetten har markerat ut var ringen ska sitta och hur stor ring man ska ha.

Genomförande

Tillverkning:



Börja med att, i gördeln, rita av ringens innerkant och klippa upp ett hål där du markerat att ringen ska sitta.



Rita av ringens innermått på tyget som ringen ska kläs med (ska vara dubbelt tyg antingen tyg/tyg eller tyg/fiberfill)



Sy efter markeringen och klipp sedan bort ”innehållet” i ringen



Vräng tyget och trä på ringen

Trä igenom tyget i hålet på gördeln. Om du använt fiberfill, ska detta läggas på insidan av gördeln så det kommer närmast huden. Ringen ska läggas på utsidan av gördeln mellan gördel och tyget.

Sy runt ringen så nära det går



Sy sedan 1-2 varv extra runt ringen med en pressarfots avstånd till tidigare söm. (Totalt 3 varv kan vara bra om tex skenor tagits bort eller pat behöver extra stabilitet kring stomin)



Klipp bort överflödigt tyg och sy en sicksack-sömn över den yttre sömmen

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Neuro- och rehabiliteringsklinik

Innehållsansvar: Elin Sahlmark, (elisa33), Ortopedingenjör

Granskad av: Rebecka Molid, (rebal1), Ortopedingenjör

Godkänd av: Malin Camper, (malgu5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9661-671614304-72

Version: 4.0

Giltig från: 2025-11-10

Giltig till: 2027-11-10