

Gäller för: Neuro- och rehabiliteringsklinik

Innehållsansvar: Johanna Nyberg, (johpe46), Ortopedtekniker

Granskad av: Rebecka Molid, (rebal1), Ortopedingenjör

Godkänd av: Malin Camper, (malgu5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-02-03

Giltig till: 2027-02-03

Sula och utfyllnad

Sammanfattning


Definierar riktlinjer för inslipning av sulor på ortoser inför provning.

Förutsättningar

Till sulor och utfyllnad används EVA i första hand. Slitsula kan limmas på vid färdigställning.

Genomförande

Till provning:

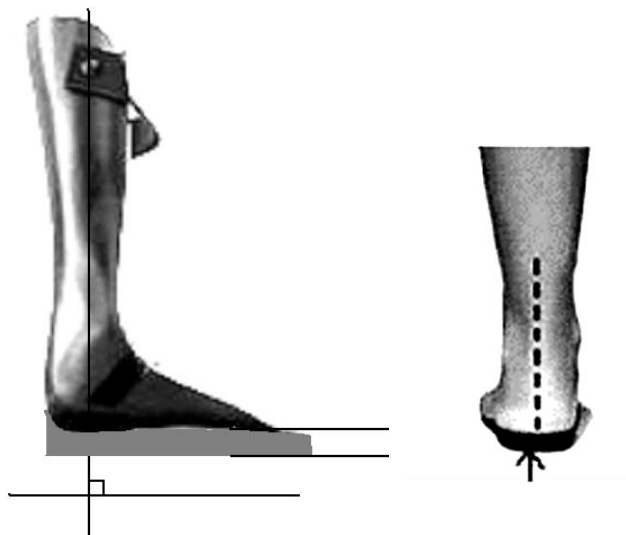

Sula:

Sagitalplan: Ange antal mm under mtp-led och vinkel på underbenet i förhållande till underlag.

Underbenet är i 90° mot underlaget om inget annat anges.

Frontalplan: Posterioert ställs calcaneus neutralt om inget annat anges

Utfyllnad:

Från häl till mtp-led, inga förhöjningar, endast utfyllnad

OBS: Om inget står angivet så slipa EVA-sulan så att det är 0 mm längst fram och underbenet är i 90° mot underlaget

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Neuro- och rehabiliteringsklinik

Innehållsansvar: Johanna Nyberg, (johpe46), Ortopedtekniker

Granskad av: Rebecka Molid, (rebal1), Ortopedingenjör

Godkänd av: Malin Camper, (malgu5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9661-671614304-76

Version: 6.0

Giltig från: 2025-02-03

Giltig till: 2027-02-03