

Gäller för: Ögonmottagning Borås

Giltig från: 2024-10-04

Innehållsansvar: Elise Rodin Karlsson, (eliro5), Operationssjuksköterska

Giltig till: 2026-10-03

Granskad av: Elise Rodin Karlsson, (eliro5), Operationssjuksköterska

Godkänd av: Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

Skicka in/ta emot defekta instrument på reparation, ögonmottagningen SÄS

Sammanfattning

Rutinen redogör hantering av defekta instrument som ska skickas in eller tas emot på reparation.

Genomförande

Markera instrument med ett rött plastband innan disk. Diska som vanligt i maskinen. Om ett instrument plockas ur ett galler måste det ersättas med ett nytt särpackat. OBS det särpackade instrumentet måste ur sterilens system. Skicka med returlistan och skriv " Ur systemet" på det särpackade instrumentet. Lägg det sedan i en engångs rondskål på bänken på orena sidan. När det finns 5–6 st instrument skickas de in för reparation.

Fyll i listan på tavlan. Glöm ej signera. Packa varsamt i bubbelplast så att instrumenten ej skadas. Om det finns, sätt skydd på toppen (finns eventuellt i skåpet på rena sidan). Lägg det sedan i ett vadderat kuvert eller liten låda. Sätt på en streckkod som gäller som frimärke. Finns i högskåpet på rena sidan.

Ta en kopia på listan. Kopian sparas i den blå mappen som finns i skåpet på rena sidan. Bifoga originalpappret samt ett dekontamineringsintyg (finns i blå mappen). Skriv adress och avsändare på försändelsen. Häng upp en ny lista på tavlan på orena sidan (finns i blå mappen).

- Lämna till posten på K1.
- När instrumenten kommer tillbaka diskas de i maskinen en gång.
- Skickas till sterilen för att komma in i systemet.
- Skriv vilka instrument det är.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ögonmottagning Borås

Innehållsansvar: Elise Rodin Karlsson, (eliro5),
Operationssjuksköterska

Granskad av: Elise Rodin Karlsson, (eliro5), Operationssjuksköterska

Godkänd av: Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9664-1214603886-70

Version: 5.0

Giltig från: 2024-10-04

Giltig till: 2026-10-03