

Skärmar till Vscan Air CL (utrag ur Användarmanualen sid 3-24 samt 3-25)

Krav

Vscan Air-appens visningsenhet måste ha minst 700 MB ledigt utrymme vid start.

Mobila plattformar som stöds

- Kompatibla operativsystem
 - Androidtelefoner och -surfplattor med version 9, 10 eller 11 av operativsystemet, enhet med 0x64 ARM-baserad processorarkitektur och 64-bitars kärna, Android Open GL ES 3.0 och kompatibilitet med Google Play Store
 - iPad- och iPhone-enheter med iOS 13 eller 14
- Skärmkrav
 - Storlek: 5 till 20 tum
 - minst 960 x 640 (eller 640 x 960) pixlar
- Nödvändigt internminne: minst 8 GB
- Anslutningskrav
 - IEEE 802.11n
 - Peer-to-peer-anslutning (endast Android)
 - Bluetooth BLE 4.0
- Säkerhetskrav
 - WPA2
 - Data på enheten måste krypteras och autentisering måste tillämpas

OBS: Om Vscan Air-appen används med en mobilenhet som inte uppfyller minimikraven kan det leda till bilder av låg kvalitet, oväntade resultat och risk för feldiagnos. Vscan Air-appen kanske inte fungerar med alla enheter.

Vscan Air-appen för iOS har validerats för användning med följande visningsenheter

I Apple iPhone-enheter:

- iPhone 12 Pro Max iOS 14
- iPhone 11 iOS 13

Apple iPad-enheter:

- Apple iPad Pro 4:e generationen, iPad OS 14
- Apple iPad Mini 5, iPad OS 13
- Apple iPad 7:e generationen, iPad OS 13

Samsung-mobiltelefoner:

- Samsung Galaxy Tab S7 Android 10
- Samsung Galaxy Tab S6 Android 10
- Samsung Galaxy Tab S9 (Intl.) Android 10
- Samsung Galaxy Tab S20 Android 11
- Samsung Galaxy Tab S10+ (Intl.) Android 10
- Samsung Galaxy Tab S10 (Intl.) Android 10

- Mer information om validerade visningsenheter finns på supportcentret för Vscan Air. <https://vscanair-support.gehealthcare.com/>