

Checklista före användning

- Ta med övervakningsutrustning, EKG sladd och saturationsprobe från avdelningen. Fäst på anvisad plats på bordet. Koppla in rektaltempprobe.
- Placera bordet enligt bild
- Anslut till el, luft och syrgas
- Ställ in lämplig värmeeffekt, för prematurt barn 50-100%
- Gör täthetskontroll på andningsblåsan och välj lämplig maskstorlek. Ställ in flöde på 10 L/min och 21% syrgas.
- Kontrollera funktion på neopuffen. Om barnet är mindre än 37 veckor: tryck 20/4, maxtryck 30 cmH₂O. Välj lämplig maskstorlek samt ställ in flöde 10 L/min och 21% syrgas.
- Om barnet är mindre än 34 veckor ska uppvärmd befuktad andningskrets användas. Koppla sterilt vatten till befuktaren och koppla in den uppvärmda andningskretsen till neopuffen.
- Kontrollera att det finns luft och syrgas i tuberna. Minst 60 bar.
- Kontrollera att stetoskopet fungerar.
- Kontrollera att sugen fungerar och att det finns sugkatetrar. Välj lämplig sugkateterstorlek.
- Kontrollera att det finns varma filter och mössor i värmeskåpet.
- Ta fram dokumentationsmaterial.
- Glöm inte att hämta 10 ml donerad bröstmjolk strax innan förlossningen.