

Checklista före användning av rPAP

- Placera rPAP enligt bild.
- Anslut till el, luft och syrgas.
- Kontrollera att slangset är korrekt anslutet och helt.
- Välj om du ska använda ansiktsmask, näsmask eller prongs.
- Kontrollera funktion på rPAP. Om barnet är <37 veckor: tryck 20/4 cmH₂O. Om barnet är >37 veckor: tryck 30/4. Ställ in flödet på 9 L/min och 21% syrgas.
- Koppla påsen med sterilt vatten först när rPAP ska tas i bruk och starta då befuktaren.
- Kontrollera att det finns luft och syrgas i tuberna. Minst 60 bar.