

Rutiner vid patientnära analysverksamhet

Vid patientnära analysverksamhet bör all personal få introduktion om provtagning. Venös provtagning är alltid att föredra då det ger ett bättre prov och därmed ett analys svar med högre kvalitet. Kapillär provtagning endast i undantagsfall vid mycket svårstuckna patienter.

Fundera på att utföra provtagning venöst och att sedan skicka proverna för analys till laboratoriet på Unilabs vilket då ger bra kvalitet även på analysresultaten.

Det är viktigt att förstå vikten av identitetskontroll och märkning av proverna med namn och personnummer. Det finns ett etikettprogram som heter PeLO Label som vi använder för etikettutskrift.

Vid analysverksamhet såsom Hb och P-glukos på HemoCue analyseras interna kontroller dagligen, två olika nivåer varvas varannan dag. Dokumentera resultaten på kontrollblad. Kontroller analyseras regelbundet av de personer som ska använda analysinstrumenten. Har ibland sett att samma person utses att alltid analysera kontrollen på morgonen men sedan är det många andra som använder analysinstrumentet under dagen. Detta är ingen bra rutin.

Vid analys av Hb och P-Glukos från venöst prov räcker det att analysera en kyvett/analys **men** vid kapillärprovtagning måste man alltid analysera två kyvetter för Hb.

Instruktör Eva Grandin på HemoCue AB besöker nya användare. Alla användare behöver få en grundlig genomgång om handhavande kring HemoCue-instrumenten, analys av kontroller och patientprover, rengöring, underhåll mm. Kontakt kan tas med Eva.Grandin@HemoCue.se eller 0734-140001

Delta i Equalis kvalitetssäkringsprogram för "patientnära analyser". De skickar ut prover sk extern kontroll med jämna mellanrum ca 10 ggr/år. Varje enhet rapporterar sitt resultat till Equalis online och sedan får någon med övergripande ansvar ansvara för att följa upp resultaten.

Clinitek Status+ används för urinsticka. Kontroller analyseras när ny reagensförpackning öppnas eller minst en gång per vecka.

/ 2017-05-17 Lena och Ewa-Carin