



ThinPrep® Pap Test

Instruktion för provtagning och provöverföring

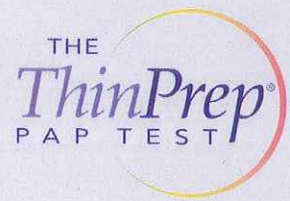


Protokoll för provtagning med plastspatel och borste

- Förbered allt material innan provtagning.
- Kontrollera utgångsdatum på burken. Använd inte utgången material.
- Se till att plastförseglingen från locket är helt borttagen.
- Fyll i patientdata på både remiss och burk. Saknas detta returneras provet.
- Öppna burken innan provtagning.
- Använd inte glidmedel då detta kan påverka den vätskebaserade provprepareringen.

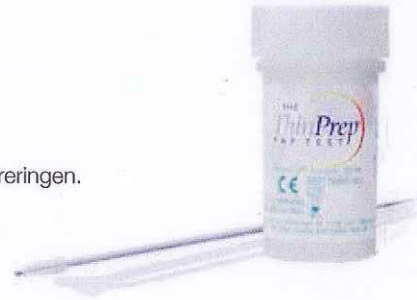

Fyll i

Patientens namn och födelsedata på burken.
Patientens medicinska historia på cytologiremissen.

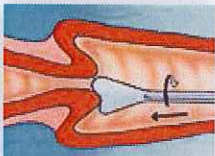


Ta

Ett adekvat prov från portio med plastspatel. Vid behov använd ljummet vatten på spekulum.
För in den utskjutande delen av spateln in i cervixkanalen och rotera lugnt 360°. Håll nära kontakt med portio under hela den roterande rörelsen för att täcka hela transformationszonen.



Skölj

Spateln omedelbart i PreservCyt® Solution-lösningen i burken, vispa runt kraftigt i 10 varv.
Släng spateln.

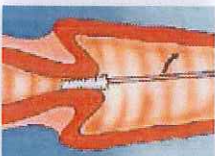

Ta

Ett adekvat prov från endocervix med en borste/cytobrush.
För in borsten i cervixkanalen till endast det nedersta av borsten syns.
Roter sakta ¼ till ½ varv medurs. UNDVIK ÖVERDRIVEN ROTERING.



Skölj

Borsten omedelbart i PreservCyt® Solution-lösningen under det att borsten trycks mot burkens vägg, rotera borsten i vätskan 10 varv. Vispa sedan borsten ordentligt för att frigöra ytterligare material.
Släng borsten.



Skruva

På locket på burken så de svarta markeringarna möts eller överlappar en aning.



Lägg

Burk och remiss i transportlåda eller liknande för transport till laboratoriet.

Vanliga frågor

Vad gör jag om burken välter?

Om burken välter efter provtagning, se efter om det är någon vätska kvar i burken. Om det är ca en tredjedel kvar kan burken sändas till laboratoriet. Skriv på remissen att del av vätskan har spillts ut. Fyll inte upp vätskan i burken med vätska från en annan burk. Laboratoriet kommer att fylla upp provet och processa det.

Om ingen vätska finns kvar måste provet tas om.

Kan jag ta ett prov om patienten har mens?

Nej, prov vid menstruation ska undvikas.

Kan jag använda glidmedel?

Använd inte glidmedel då detta kan inverka på ThinPrep Pap Test-provet.

Behöver jag ta ett separat prov för HPV-test?

Nej, HPV test kan göras på det material som finns i burken.

Att göra

- **Att** försiktigt ta bort slem, om det finns mycket, innan provtagning.
- **Att** använda spatel och borste/cytobrush ihop eller en Cervex Brush/kombiborste ensam.
- **Att** rotera plastspateln 360° och borste/cytobrush ¼ till ½ varv.
- **Att** omedelbart skölja av provtagningsmaterialet i burken.
- **Att** skruva på locket så de svarta markeringarna möter varandra eller överlappar en aning för att undvika läckage.
- **Att** hålla den del av burken som inte har etikett fri så att man ser vätskan.
- **Att** sända provet till laboratoriet utan dröjsmål.

Inte göra

- **Inte** rengöra cervix innan provtagning.
- **Inte** enbart använda borste/cytobrush vid provtagning.
- **Inte** under några omständigheter använda en träspatel.
- **Inte** använda glidmedel.
- **Inte** låta provtagningsmaterial stå i burken under tiden du tar hand om patienten.
- **Inte** skruva på locket för hårt.
- **Inte** ta loss borsthuvudet och lämna i burken vid användning av en Cervexbrush/kombiborste.
- **Inte** placera flera olika etiketter på burken.
- **Inte** använda burk vars hållbarhetstid gått ut på.
- **Inte** försena inskick av burk till laboratoriet.



Hologic Sweden AB
Sollentunavägen 63
SE-191 40 Sollentuna
Sweden
Tel: 08-585 798 05
Nordiclnq@hologic.com

1. Cervicovaginal Cytology Based on the Papanicolaou Technique; Approved Guideline - Third Edition (Clinical and Laboratory Standards Institute GP 15-A3).

TRN-00127-NOR-SE, Rev 001© 2013 Hologic, Inc. Med ensamrätt. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Hologic, ThinPrep, PreservCyt och tillhörande logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Hologic, Inc. och / eller dess dotterbolag i USA och / eller andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. Denna information är avsedd för vårdpersonal i USA och på andra marknader, och är inte avsedd som en produkt godkännande eller kampanj där sådana aktiviteter är förbjudna. Eftersom Hologic materialet distribueras via webbplatser, eBroadcasts och mässor, är det inte alltid möjligt att kontrollera om råvarorna visas. För specifik information om vilka produkter som är tillgängliga för försäljning i ett visst land, kontakta din lokala Hologic representant eller skriv till Nordiclnq@hologic.com.