

Bilaga 1 - Akut omhändertagande på förlossningen av prematur

Återupplivningsbord Panda Warmer

Checklista före användning:

- Tänd lampan över återupplivningsbordet.
 - lämplig **värmeeffekt?**
Misstänkt asfyxi: 25%
Prematur: 50–100%
 - Fungerar laerdalblåsan? Lämplig mask?
 - **Kontrollera funktionen på neopuffen.**
Blender inställd på 10l/min. Lämplig mask?
 - **Starta med syrgas?**
>v32 21%
<v32 21-30%
<v.28 30%
- | |
|--------------------------------------|
| <37veckor
PIP: 20-25
PEEP: 4-5 |
| >37veckor
PIP: 30
PEEP: 5 |
- < v34 skall befuktaren fyllas med sterilt vatten och startas samt kopplas till neopuffsystemet.
 - <v28 Ta fram plastpåse.
 - Kontrollera att det finns oxygen och luft i tuberna (minst 60 bar), men låt dem vara stängda så länge du är kvar på förlossningen.
 - Kontrollera att sugen fungerar samt att lämplig sugkateter finns ansluten.
 - Stetoskop? Kontrollera att det fungerar.
 - Plocka fram lämplig övervakningsutrustning.
 - Kontrollera att laryngoskoperna fungerar.
 - Finns det varma dukar och mössor i värmeskåpet?
 - Ta fram protokoll.